

## HYALISTIL SYNFO SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML

**Marchio:** HYALISTIL  
**Codice Min.:** 980813962  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Hyalistil SYNFO** Descrizione Dispositivo medico sterile. Soluzione oftalmica bilanciata sterile, a base di sodio ialuronato, xanthan gum e sostanze ad azione osmoprotettiva. Grazie ai suoi componenti, protegge, idrata e lubrifica la superficie oculare. È indicato in tutti i casi di discomfort oculare. Contiene due polimeri naturali, il sodio ialuronato e lo xanthan gum con proprietà lubrificanti, idratanti e mucomimetiche. Entrambi mostrano un'attività riepitelizzante e antiossidante che risulta potenziata dalla loro azione sinergica. Contiene inoltre glicina e betaina, sostanze la cui azione osmoprotettiva favorisce il mantenimento dell'omeostasi cellulare normalmente alterata in caso di secchezza oculare. Glicina e betaina giocano un ruolo nella fase di rimodellamento epiteliale durante il processo di guarigione delle ferite e agiscono da osmoprotettori nelle cellule esposte a stress

iperosmotico. Idrata, lubrifica e ripara la superficie dell'occhio, contribuisce a ristabilire l'omeostasi della superficie oculare e la protegge dal danno ossidativo. Garantisce una sensazione di benessere duraturo e di massimo comfort. Non contiene conservanti e pertanto può essere utilizzato anche dai portatori di lenti a contatto. Componenti Sodio ialuronato, xanthan gum, glicina, betaina, tampone Tris-HCl, sodio cloruro, acqua purificata. Senza conservanti e fosfati. Modalità d'uso Instillare 1 goccia di Hyalistil SYNFO quattro volte al dì nel fornice congiuntivale o secondo necessità. Prima della somministrazione, rimuovere il sigillo di sicurezza e il tappo di protezione. Instillare 1 goccia in ciascun occhio, premendo il flacone. Scuotere il flacone verso il basso per eliminare l'eventuale goccia residua sul contagocce. Dopo l'uso richiudere immediatamente il flacone. Avvertenze Per esclusivo uso topico oculare. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non utilizzare se il flacone è aperto o danneggiato. Durante l'applicazione, assicurarsi che la punta del flacone non venga a contatto con gli occhi, le palpebre o qualsiasi altra superficie. La somministrazione del prodotto a bambini o persone con abilità limitata deve essere effettuata da parte di un adulto responsabile. Non utilizzare in caso di ipersensibilità verso uno dei componenti. Non sono note interazioni del prodotto con la somministrazione di farmaci per uso oftalmico; tuttavia, si sconsiglia di non somministrare altri farmaci o dispositivi medici per uso oftalmico nei 10 minuti successivi alla somministrazione di Hyalistil SYNFO. Non è necessario rimuovere le lenti a contatto prima della somministrazione di Hyalistil SYNFO poiché il prodotto non altera le caratteristiche fisiche, inclusa la trasparenza, delle più diffuse lenti a contatto morbide, semirigide e rigide. L'uso del prodotto può occasionalmente causare lieve bruciore o irritazione. Nel caso in cui si manifestino alcune di queste reazioni, sospendere l'uso del prodotto. Conservazione Conservare ad una temperatura non superiore a 25°C. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Non disperdere il prodotto nell'ambiente dopo l'uso. Validità post-apertura: 6 mesi. Formato Flacone da 10 ml.