

## IRIDINA GOCCE LUBRIFICANTI 10 ML

**Marchio:** IRIDINA  
**Codice Min.:** 933893455  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



iridina gocce lubrificanti Soluzione sterile per uso oftalmico con un pH fisiologico a base di sodio ialuronato. Il sodio ialuronato conferisce al dispositivo medico proprietà muco-mimetiche e visco-elastiche in modo da garantire un'adeguata lubrificazione della superficie oculare, proteggendola dall'attrito generato dai movimenti oculari. Inoltre, il polimero è in grado di trattenere l'acqua: per questo motivo la soluzione è in grado di mantenere umidificata la superficie oculare e aumentare la stabilità del film lacrimale, proteggendo la mucosa oculare dagli agenti esterni. La soluzione contiene acido borico e sodio tetraborato decaidrato, come sistema tampone, e sodio cloruro così da garantire una soluzione fisiologica. Pertanto, Iridina svolge un'azione idratante e lubrificante per la superficie oculare e dà un temporaneo sollievo al bruciore, all'irritazione ed ai disagi correlati alla secchezza oculare. La

concentrazione di sodio ialuronato allo 0,4% consente una maggiore idratazione con un'azione prolungata nel tempo. Può essere utilizzato con lenti a contatto, senza necessità di rimuoverle, e anche dai bambini a seguito di consulto medico. Ingredienti Sodio ialuronato 0,4%, acido borico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro, acqua ppi. Modalità d'uso Prima della somministrazione, rimuovere il tamper-evident e rimuovere il tappo di protezione. Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il polidose. Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone: il contenuto può essere riutilizzato entro 6 mesi dalla prima apertura. Indicato per uso frequente, più volte al giorno, in base al bisogno o alle indicazioni del medico. La visione può essere temporaneamente offuscata dopo la somministrazione del prodotto. Se l'effetto persiste o peggiora, consultare il medico. Formato Flacone da 10 ml.