

ISOMAR NASO CHIUSO SOLUZIONE ACQUA DI MARE IPERTONICA PER DECONGESTIONE NASO CHIUSO 50 ML

Marchio: ISOMAR
Codice Min.: 8017045008306
Link: [clicca qui per acquistare](#)



ISOMAR Naso Spray Decongestionante Dispositivo medico CE0123 di classe IIa. Soluzione ipertonica a base di acqua di mare allo stato puro appositamente studiata per ottenere una efficace azione decongestionante naturale delle mucose nasali. L'acqua di mare ipertonica libera il naso dal muco in eccesso per osmosi, non induce assuefazione, non danneggia la mucosa, non produce sovradosaggio e si può utilizzare anche in gravidanza. È indicato per fluidificare e migliorare il drenaggio delle mucosità nasali e ridurre l'edema alle alte vie aeree; decongestionare le fosse nasali dal muco ristagnante nei casi di raffreddore e rinite allergica; lenire la sintomatologia nei pazienti affetti da sinusite e rinosinusite; detergere a fondo le cavità nasali allontanando

polveri e smog. Modalità d'utilizzo Effettuare 2-3 nebulizzazioni per narice ogni 4-5 ore, lasciare agire la soluzione per alcuni secondi prima di soffiarsi il naso. Si consiglia di non superare le due settimane di trattamento. Nel caso di riniti particolarmente ostinate, alterare con Isomar Spray Igiene Quotidiana per altre due settimane. Se il disturbo persiste consultare il proprio medico di fiducia o uno specialista. Non utilizzare al di sotto di un anno di età. Componenti Acqua di mare ipertonica (concentrazione salina naturale dell'acqua di mare intorno al 3%). Non contiene conservanti né coloranti. Gas propellente: azoto. Avvertenze Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare, né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini, impiegare il prodotto esclusivamente per l'uso a cui è destinato. Sui bambini può essere utilizzato a partire dai 12 mesi e deve essere applicato da un adulto. Non utilizzare dopo la data di scadenza. In alcuni casi può risultare minimamente irritante. Conservazione Conservare ad una temperatura compresa tra 5°C e 25°C. Validità a confezionamento integro: 60 mesi. Formato Flacone da 50 ml Numero registrazione marchio CE 0123 Cod.GA08040