

## KALOIDON PLUS GEL CICATRICI 30 ML

**Marchio:** KALOIDON  
**Codice Min.:** 973914753  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Kaloidon Plus Descrizione** Kaloidon Plus è un medical device che, grazie ai suoi componenti è in grado di mantenere l'idratazione e l'elasticità della pelle favorendo un rapido ammorbidimento ed appiattimento della cicatrice. Su cicatrici e cheloidi già sviluppati rende elastico ed idratato il tessuto indurito, migliorando l'aspetto estetico. Applicato precocemente dopo un intervento chirurgico o dopo un insulto lesivo di varia natura, Kaloidon Plus agisce prevenendo l'insorgere degli inestetismi cutanei. Prima dell'uso accertarsi che la cicatrice sia formata e che la cute sia integra e perfettamente pulita ed asciutta. Modalità d'uso Kaloidon Plus va applicato più volte al giorno massaggiando delicatamente e leggermente fino a completo assorbimento.

Su cicatrici estese e particolarmente ispessite può essere applicato anche in

compressiva. Per ottenere i risultati migliori dal punto di vista estetico il trattamento può essere prolungato anche oltre i 6 mesi. Componenti Acqua purificata, allantoina, pullulano, EDTA, sodio benzoato, glicole propilenico, fenossietanolo, carbomer, trietanolamina, estratto alcoolico di cipolla, glicosamminoglicani, acido benzoico, acido deidroacetico, sodio ialuronato. Avvertenze Non usare su cute lesa. Evitare il contatto con occhi, mucose. Non usare in presenza di patologie dermatologiche che alterano l'integrità della cute. Applicare il prodotto con mani pulite. Non usare in contemporanea ad altri prodotti topici. Non usare se la confezione è aperta o danneggiata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Chiudere bene il tappo dopo ogni uso. Uso esterno. Non disperdere il contenitore dopo l'uso. Non sono conosciuti effetti indesiderati al prodotto; non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. In caso di effetti indesiderati, interrompere immediatamente il trattamento e riferire al medico o al farmacista. Controindicazioni: l'uso di questo dispositivo medico è controindicato nei casi di allergie note o sospette a una qualsiasi delle sostanze contenute nel dispositivo. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta, lontano da fonti di calore e a temperatura inferiore a 30°C. Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Dopo la prima apertura il prodotto è stabile per 6 mesi. Formato Tubo da 30 ml. Cod. CU608