

KIT DI RICAMBIO RINOWASH

Marchio: MARKOS MEFAR
Codice Min.: 933872739
Link: [clicca qui per acquistare](#)



KIT RICAMBI RINOWASH Descrizione Kit di ricambi per il dispositivo per il trattamento delle vie aeree superiori Rinowash. Modalità d'uso Pulizia: Rinowash smontato nei suoi componenti può essere lavato con acqua calda (circa 40°C) usando del detergente (dosato secondo le indicazioni del produttore del detersivo stesso) e sciacquato sotto acqua corrente. Quando tutte le parti sono state pulite possono essere asciugate con un panno morbido e riposte. Disinfezione: tutti i componenti della doccia nasale Rinowash dopo essere stati lavati possono essere immersi in una soluzione disinfettante fredda (come ad esempio una soluzione con concentrazione di sodio ipoclorito non superiore al 2%), seguendo le istruzioni indicate dal produttore della

stessa. È possibile disinfettare tutti i componenti della doccia nasale facendoli bollire in acqua per un tempo massimo di 10 minuti: i componenti non devono trovarsi a contatto diretto con il fondo della pentola. Il ciclo di bollitura potrebbe alterare il colore o l'estetica dei componenti; ciò non pregiudica il funzionamento del dispositivo. Sterilizzazione: tutti i componenti della doccia nasale Rinowash, sono compatibili con il ciclo di sterilizzazione in autoclave a 121°C per almeno 15 minuti (massimo 30 minuti) per un massimo di 20 cicli. Composizione Atomizzatore: policarbonato. Campana esterna: policarbonato e silicone. Guarnizione di tenuta: silicone. Tutti i materiali utilizzati non contengono ftalati e non è rilevata la presenza di lattice naturale. Avvertenze Il presente kit di ricambi può essere utilizzato solo con il dispositivo Rinowash. Fare riferimento alle istruzioni d'uso del dispositivo Rinowash. Conservazione Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra i -25°C e i +50°C e ad un'umidità compresa tra il 30% e il 90%. Formato La confezione contiene: - 1 atomizzatore - 1 campana esterna - 1 guarnizione di tenuta. Cod. 471232