

KIT RACCOLTA URINA PRONTURINA PER BAMBINO

Marchio: -
Codice Min.: 904566940
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Pronturina Sistema per la raccolta delle urine dei più piccoli Metodo semplice ed affidabile, che permette di ottenere un campione di urine, utilizzabile sia per effettuare il test rapido con strisce reagenti, sia i test chimico fisici di laboratorio. Facile da usare, senza stress per bimbo e mamma. Con patch assorbenti anatomici, a triplo filtrante, ipoallergenici validati per catturare e liberare l'urina senza interferire sugli sviluppi diagnostici. Modalità d'utilizzo 1. Pulire l'area genitale del bambino utilizzando un sapone neutro. 2. Aprire uno dei patch, rimuovere la striscia proteggi adesivo e sistemarla sul pannolino. 3. Quando il bambino ha fatto la pipì, controllare che non ci siano feci. In assenza di feci, rimuovere il patch dal pannolino. 4. Prendere la siringa contenuta in

Pronturina, rimuovere il pistone e introdurre il patch arrotolato, con la parte adesiva all'esterno, all'interno della siringa. 5. Prendere la provetta contenuta in Pronturina e introdurre il beccuccio terminale della siringa al suo interno. Premere lo stantuffo, riempire la provetta e chiuderla. Formato Kit composto da 2 patch, 1 siringa per spremitura ed 1 provetta con tappo.