

LACRISUN 10 ML

Marchio: -
Codice Min.: 982821074
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Lacrisun Descrizione Soluzione oftalmica con formulazione a base di riboflavina sodio fosfato (0,075%), vitamina E, acido ialuronico e amminoacidi. Contribuisce alla stabilità della superficie oculare, regolandone pH ed osmolarità e proteggendo l'epitelio corneale soggetto a differenti tipi di stress. Promuove la bagnabilità della superficie oculare e ne migliora la lubrificazione. Ha un'azione contro i danni causati da lunghezze d'onda luminose quali raggi UV ed accelera il naturale processo riparativo dell'occhio secco. È inoltre indicato per pazienti affetti da cheratocono o sottoposti ad intervento di cross-linking corneale. Può essere utilizzato con lenti a contatto indossate. Senza conservanti. Modalità d'uso 1. Aprire il flacone e rimuovere il tappo di protezione. 2. Premere delicatamente il flacone e instillare 1/2 gocce in ciascun occhio; ripetere l'operazione in base alle esigenze. Dopo l'uso, chiudere il flacone.

Componenti Riboflavina sodio fosfato (0,075%), vitamina E TPGS, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio ialuronato, sodio fosfato monobasico monoidrato, L-prolina, L-glicina, L-leucina, L-lisina cloridrato, sodio cloruro, acqua purificata. Avvertenze - Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. - Il prodotto è monopaziente. - Non utilizzare nei casi di riconosciuta intolleranza o ipersensibilità ai suoi componenti. - Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del flacone. - Non utilizzare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. - In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico. - Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. - Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni riportate nel foglio illustrativo. - In rari casi sono stati riscontrati fenomeni di microcalcificazioni corneali in pazienti trattati con preparazioni oftalmiche contenenti fosfati. In tal caso sospendere immediatamente il trattamento e consultare il proprio medico. - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. - La soluzione può macchiare superfici o tessuti. Conservazione Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Validità post-apertura: 2 mesi. Formato Flacone da 100 ml. Cod. DROPTHE04SAG