

LACTOYAL FREE 10 ML

Marchio: SOOFT ITALIA
Codice Min.: 971528207
Link: [clicca qui per acquistare](#)



LACTOyal free Descrizione Lactoyal free è una soluzione oftalmica sterile e isotonica contenente acido ialuronico sale sodico (FHA 1.0) e acido lattobionico. L'acido ialuronico è un mucopolisaccaride che entra a far parte di numerosi tessuti dell'organismo. Ha la proprietà di aderire allo strato mucinico della superficie oculare proteggendola, umidificandola e lubrificandola. Per le sue caratteristiche mucoadesive permane a lungo sulla superficie dell'occhio e stabilizza il film lacrimale. L'acido lattobionico è un poli-idrossiacido complesso costituito da acido gluconico e galattosio. Questa molecola presenta un alto potere idratante ed ha proprietà antiossidante. Al flacone di Lactoyal free è applicato il contagocce OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) che, tramite il suo sistema di filtro assoluto e valvola, garantisce il mantenimento della sterilità

del prodotto senza l'utilizzo di conservanti. Sostituto lacrimale stabilizzante e reintegrante del film lacrimale. Utile in caso di alterazioni della superficie corneo-congiuntivale legate a carenze qualitative del film lacrimale derivanti da stati infiammatori, sbilanciamento del potenziale ossidoriduttivo, accumulo di radicali liberi, stress di natura meccanica e ambientale a carico della superficie oculare. Modalità d'uso 1-2 gocce nel sacco congiuntivale 2-3 volte al giorno o più, secondo parere medico. Il prodotto può essere instillato anche quando si indossano le lenti a contatto. Al primo utilizzo rimuovere l'anello di plastica che sigilla il tappo tirando la linguetta laterale. Togliere il tappo. Capovolgere il flacone sopra l'occhio e con il dito indice e pollice applicare una pressione crescente sui lati fino alla fuoriuscita della goccia. È possibile che con l'esaurirsi della soluzione contenuta nel flacone sia necessario applicare una forza maggiore. Richiudere il flacone con il tappo. Componenti Componente principale: lattobionato di sodio 4%, sodio ialuronato 0.15% (FHA 1.0). Altri componenti: sodio fosfato monobasico biidrato, sodio fosfato bibasico biidrato, acqua per preparazioni iniettabili. Avvertenze Controindicato in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. Per eliminare il rischio di contaminazione della soluzione, evitare che il contagocce entri in contatto con l'occhio o con altri oggetti. Per evitare lesioni della superficie oculare evitare che durante l'instillazione il contagocce entri in contatto con l'occhio. Con il progressivo esaurimento della soluzione nel flacone sarà necessario applicare maggior forza per determinare l'uscita della goccia. Richiudere bene il flacone dopo l'uso. In caso di somministrazione concomitante di farmaci oftalmici topici, consultare il medico. Non utilizzare il prodotto se il flacone OSD è danneggiato. Tenere il preparato fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non sono stati riportati effetti indesiderati dopo l'uso del prodotto. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico. Dopo l'applicazione del prodotto può verificarsi un lieve e passeggero offuscamento visivo. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza

indicata sull'etichetta del flacone. Non disperdere nell'ambiente. Conservazione Non conservare a temperatura superiore a 25 °C. Formato Flacone da 10 ml Cod. 6731