

LAVANDA VAGINALE CANDINET 5 FLACONI MONODOSE 100 ML

Marchio: CANDINET
Codice Min.: 8032836150415
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Candinet LAVANDAVAGINALE MONOUSO DescrizioneDispositivo medico che esercita un'azione di protezione nei confronti delle mucose intime sensibili. Coadiuvante nei casi di prurito e flogosi, dovuti ad una flora batterica alterata a causa di infiammazioni, candidosi ed infezioni urinarie ricorrenti, aiuta il riequilibrio dell'ecosistema della zona genitale. Particolarmente indicato in tutte quelle situazioni in cui è utile associare un'azione igienizzante e protettiva nei confronti degli agenti micotici; il dispositivo medico contribuisce, infatti, a creare un ambiente acido, sfavorevole alla sopravvivenza dei germi patogeni. In associazione a trattamenti specifici, è un utile coadiuvante nel ripristinare il benessere e la funzionalità delle mucose quando queste sono soggette a vaginosi

batteriche, vulvovaginiti e micosi. Modalità d'usoSeparare un blister, aprirlo staccando parzialmente un lembo della carta ed estrarre la cannula premendo dalla parte opposta. Aprire il contenitore togliendo la chiusura a strappo sul tappo e posizionare la cannula inserendola sul terminale aperto. Inserire sulla cannula l'apposito stringitubo che potrà essere utilizzato volendo interrompere l'erogazione del liquido. Sedersi sul bidet o sul WC e procedere alla lavanda premendo il flacone per farne uscire il contenuto. La soluzione, dopo l'apertura, non deve essere conservata a lungo nel flacone aperto. Gettare flacone e cannula dopo l'uso. La confezione contiene 5 lavande vaginali in contenitori usa e getta da 100 ml. ComponentiAqua, PEG-40 hydrogenated castor oil, sodium caproyl/lauroyl lactylate, Hamamelis virginiana distillate, phenoxyethanol, cocamidopropyl betaine, citric acid, acetylcedrene, methyl dihydrojasmonate, phenethyl acetate, polysorbate 20. Avvertenze- Nel caso si presentassero fenomeni di sensibilizzazione, interrompere il trattamento. - Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. - Non utilizzare il prodotto qualora la confezione risulti manomessa. - Non ingerire. Evitare il contatto con occhi. - Tenere lontano dalla portata dei bambini. ConservazioneConservare a temperatura ambiente.Validità a confezionamento integro: 24 mesi. FormatoConfezione contenente 5 flaconi contenenti 100 ml di soluzione pronta all'uso, 5 cannule vaginali monouso confezionate singolarmente in blister, 1 stringitubo in cui inserire la cannula per interrompere l'erogazione. Cod. 5133