

## LIBENAR ASPIRATORE NASALE SOFT + 5 FILTRI

**Marchio:** LIBENAR  
**Codice Min.:** 982393795  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Libenar ASPIRATORE NASALE Soft Descrizione Dispositivo Medico Classe I (Direttiva 93/42/CEE). Aspiratore nasale con filtri monouso indicati per la rimozione delle secrezioni nasali in caso di comune raffreddore, rinofaringite, rinite acuta, rinosinusite e bronchiolite. Nuova punta flessibile all-in-one. Filtro protettivo. Tubo di aspirazione con boccaglio. Custodia per filtri. Neonati e bambini respirano istintivamente attraverso il naso, quindi è importante che le loro vie aeree siano libere. L'aspiratore nasale Libenar allevia delicatamente il naso congestionato del bambino per aiutarlo a respirare meglio in caso di raffreddore e rinofaringite. La sua punta morbida si adatta al naso del bambino e consente di rimuovere

delicatamente il muco in eccesso. Utilizzare tutte le volte che è necessario in caso di secrezioni nasali. Per una migliore rimozione delle secrezioni nasali, utilizzare Libenar fiale o Libenar Acqua di Mare Spray Igiene Nasale prima dell'aspirazione nasale. Si consiglia di chiedere consiglio a un medico / professionista sanitario prima di utilizzare l'aspiratore nasale Libenar nei neonati, in caso di difetti nasali congeniti, in caso di recente intervento chirurgico nasale o di lesione nasale. Modalità d'uso Prima del primo utilizzo, sciacquare il dispositivo sotto l'acqua calda e asciugarlo accuratamente. Procedere con l'aspirazione nasale prima della poppata, quando il bambino è sveglio e calmo. Lavarsi le mani. Inserire un filtro monouso nel guscio posteriore e chiudere il dispositivo con il guscio anteriore. Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente. Appoggiare il bambino sulla sua schiena. Posizionare la punta morbida dell'aspiratore nasale all'ingresso della narice del bambino e inspirare delicatamente attraverso il boccaglio. Il muco viene fermato dal filtro protettivo. Ripetere nell'altra narice. Sollevare delicatamente il bambino e pulirgli il naso con un fazzoletto. Dopo ogni utilizzo, sciacquare l'aspiratore nasale Libenar con acqua calda e asciugarlo accuratamente. Per motivi di igiene e per garantire il corretto utilizzo, inserire un nuovo filtro monouso prima di ogni utilizzo. Avvertenze Rischio di soffocamento per la presenza di piccole parti. Tenere fuori dalla portata e dalla vista di neonati e bambini. Fare riferimento al foglio illustrativo. Se i sintomi persistono per più di 5 giorni, consultare un operatore sanitario. Non sterilizzare, non bollire. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Non utilizzare il dispositivo se il suo aspetto originale è stato alterato o senza un filtro monouso. Conservazione Validità a confezione integra: 36 mesi. Formato 1 aspiratore nasale + 5 filtri protettivi monouso. Cod. 16343