

MELILAX PEDIATRIC MICROCLISMI 6 PEZZI 5 G

Marchio: ABOCA
Codice Min.: 932501416
Link: [clicca qui per acquistare](#)



MeliLAX pediatric Descrizione Dispositivo Medico CE, classe IIb. Microclisma a base di miele, che unisce un'equilibrata azione evacuante ad un'azione protettiva e lenitiva della mucosa rettale, utile per contrastare i fastidi, l'irritazione e l'infiammazione, presenti in caso di stipsi. La doppia azione di Melilax è ottenuta grazie a PROMELAXIN, un complesso attivo di mieli di nettare e di melata appositamente selezionati e lavorati in base al loro contenuto di monosaccaridi, polisaccaridi e melanoidine, arricchito con la frazione polisaccaridica da Aloe e Malva. Melilax esplica un'azione evacuante non irritante e quindi induce uno stimolo fisiologico e bilanciato di attivazione della defecazione. Inoltre Melilax, grazie alle sue proprietà mucosimili e alla sua viscosità, protegge la mucosa rettale durante il

passaggio delle feci, mimando l'azione lubrificante del muco fisiologico. Queste particolari proprietà, unite all'azione antiossidante, conferiscono al prodotto la capacità di proteggere e lenire la mucosa, esplicando un'azione antinfiammatoria indiretta dovuta alle caratteristiche fisiche del prodotto. Melilax è indicato nel trattamento della stipsi, anche in presenza di ipersensibilità viscerale (come in caso di colon irritabile), ragadi ed emorroidi. Melilax Pediatric è indicato per per bambini e lattanti. Modalità d'uso - Bambini da 3-12 anni: 1 microclisma da 5 g al bisogno. In caso di stipsi ostinata, applicare 2 dosi consecutivamente. - Bambini da 1-3 anni: 1 microclisma da 5 g al bisogno. - Lattanti da 0-1 anno: metà microclisma da 5 g al bisogno. Aprire il microclisma rimuovendo il copricannula di sicurezza: - afferrare la ghiera rotonda bianca posta sopra il soffietto; - con l'altra mano piegare il copricannula fino a provocarne la rottura e il completo distacco dalla ghiera; - sfilare il copricannula. Per facilitare l'applicazione del microclisma è preferibile posizionare il bambino sul lato sinistro con le ginocchia piegate verso l'addome. Applicare qualche goccia di prodotto nella zona perianale e introdurre delicatamente la cannula nel retto. Premere a fondo il microclisma e al termine dell'applicazione mantenerlo premuto fino ad estrazione completa della cannula, per evitare che il prodotto venga riaspirato. Ingredienti Promelaxin complesso di mieli e polisaccaridi da aloe e malva Titolo in: monosaccaridi ≥ 50%, polisaccaridi (Peso Molecolare > 20.000 Dalton) ≥ 0,3%. Contiene inoltre: miscela idroglicerica; succo di Limone; olio essenziale di Lavanda. Senza glutine. Avvertenze Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. In caso di stipsi persistente è importante consultare il medico per escludere altre patologie. Il microclisma è monouso, pertanto non deve essere riutilizzato qualora se ne somministri metà dose, come nel caso dei lattanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Validità a

confezionamento integro: 30 mesi. Formato 6 microclismi monouso con copricannula per bambini e lattanti da 5 g ciascuno. Cod. MELPECLX