

## MICROCLISMA PIGROLAX BAMBINI 6 X 5 G

**Marchio:** PEDIATRICA  
**Codice Min.:** 981498367  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**PigroLAX BAMBINI** Descrizione Dispositivo medico. Lassativo a base di estratti naturali e di componenti zuccherine con azione protettiva e lenitiva della mucosa rettale, utile per contrastare i fastidi e l'irritazione presenti in caso di stipsi. PigroLax bambini è in grado di richiamare acqua nelle feci, contribuendo ad ammorbidire la massa fecale favorendo l'evacuazione. Contiene PROPOLAX, un complesso ricco in monosaccaridi, polisaccaridi e melanoidine, provenienti da uve bianche appositamente selezionate e lavorate, arricchito con la frazione polisaccaridica di aloe, malva e altea. Il complesso PROPOLAX contiene carboidrati e polioli che favoriscono l'evacuazione in caso di stipsi mediante meccanismo osmotico blando. Aloe, malva e altea

svolgono una funzione idratante, emolliente e mucosimile, con effetto lubrificante riducendo lo sfregamento al passaggio delle feci. Inoltre la propoli idroglicerica svolge azione protettiva endoteliale a livello della mucosa rettale. Modalità d'uso - Bambini da 1-12 anni: 1 microclisma da 5 g al bisogno. - Bambini da 3-12 anni: in caso di stipsi ostinata applicare 2 dosi contemporaneamente. Uso rettale. Ogni contenitore monodose è singolarmente sigillato sino al momento dell'uso; ciò garantisce l'igiene e la praticità dell'utilizzo. Rimuovere la copri-cannula sul contenitore monodose. Lubrificare la cannula con una goccia della soluzione stessa, introdurre la cannula nel retto e premere il soffiutto. Estrarre tenendo premuto e gettare. Componenti Mosto d'uva concentrato deionizzato, sorbitolo, acqua, malva estratto fluido, Aloe barbadensis gel, altea estratto fluido, propoli estratto idroglicerico; conservanti: sodio benzoato, potassio sorbato. Avvertenze Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergie verso uno o più componenti. In caso di stipsi persistente è importante consultare il medico per escludere altre patologie. I microclismi non devono essere usati nei casi di dolore addominale acuto o di origine sconosciuta. Il microclisma è monouso, pertanto non deve essere riutilizzato. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata, né dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce, di calore e dalle basse temperature. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Formato Confezione da 6 microclismi da 5 g l'uno. Peso netto 30 g