

NEBIAL SOLUZIONE SALINA IPERTONICA DI SODIO CLORURO AL 3% CON ACIDO IALURONICO SPRAY NASALE 100 ML

Marchio: NEBIAL
Codice Min.: 931969517
Link: [clicca qui per acquistare](#)



buOna nebial 3% SPRAY NASALE Soluzione salina ipertonica al 3% con aggiunta di acido ialuronico **INDICAZIONI** La soluzione salina al 3% è utile per la decongestione delle mucose nasali e ha un effetto fluidificante sul muco; è consigliato per la pulizia quotidiana delle fosse nasali soprattutto in caso di raffreddore, rinite, sinusite e in tutte le situazioni di congestione delle mucose nasali. L'acido ialuronico contenuto favorisce l'umidificazione delle fosse nasali e rende più gradevole la soluzione salina. **MODALITÀ D'USO** Per utilizzare correttamente il prodotto è necessario: - Togliere la capsula di protezione dalla parte superiore della bomboletta ed inserire l'apposito erogatore; - Tenendo la testa piegata da un lato (mai all'indietro), inserire delicatamente nella narice superiore

l'erogatore anatomico. Può essere comunque erogato in qualsiasi posizione; - Premere per pochi secondi l'erogatore per far fuoriuscire il prodotto; - Dopo aver ruotato la testa dall'altro lato ripetere l'operazione nell'altra narice; - Sciacquare accuratamente l'erogatore sotto l'acqua corrente prima di riporre il prodotto. È consigliabile rispettare la seguente frequenza di utilizzo: - Lattanti: 1 applicazione per narice 1-2 volte al dì. - Bambini: 1-3 applicazioni per narice, 2-3 volte al dì. - Adulti: 2-4 applicazioni per narice, 3-4 volte al dì. **DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE** Ha un'azione decongestionante sulle mucose nasali oltre ad un effetto fluidificante sul muco, per questo è consigliata in caso di raffreddore rinite, sinusite e in tutte le situazioni di congestione delle mucose nasali. Lo specifico dispositivo (bomboletta BOV -Bag-On-Valve- con applicatore), permette l'ottimale nebulizzazione della soluzione, che può essere erogata in qualunque posizione. La bomboletta BOV non danneggia lo strato di ozono perché utilizza aria compressa come gas propellente. **AVVERTENZE** (generali, gravidanza e allattamento, specifiche dell'ingrediente) Recipiente sotto pressione. Non perforare né bruciare dopo l'uso. Impiegare il prodotto esclusivamente per l'uso a cui è destinato. Non utilizzare dopo la data di scadenza. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Il prodotto è destinato a utilizzo su mucosa integra. Nei bambini sotto l'anno utilizzare dietro consiglio del medico e comunque non utilizzare sotto i 3 mesi di età. In caso di reazioni avverse sospendere l'utilizzo del prodotto e contattare il medico. Conservare le istruzioni insieme al prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. **INGREDIENTI** Sodio cloruro; sodio ialuronato; potassio fosfato bibasico; potassio fosfato monobasico; acqua. Non contiene conservanti. **Conservazione** Il prodotto deve essere protetto dai raggi solari e non va esposto a temperature superiori ai 50°C. **Formato** Bomboletta BOV da 100 ml con applicatore imbustato separatamente. Cod.3040