

## NOKSAN PROTEZIONE INTERDIGITALE CALLI 9 PEZZI

**Marchio:** NOK SAN  
**Codice Min.:** 935403838  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



NOK SAN PROTEZIONE INTERDIGITALE CALLI Dispositivo medico CE, classe I. Indicati per alleviare la pressione delle scarpe su ogni tipo di callosità posta tra le dita del piede. Modalità d'uso Prima di applicare il prodotto, si consiglia un pediluvio caldo. Asciugare molto bene la parte ed applicare il prodotto sulla callosità. Dopo 36/48 ore, diventa facile l'asportazione del callo o del durone. In caso di difficoltà ripetere l'operazione. Avvertenze Non utilizzare su pelle infiammata e su piccoli tagli o screpolature, o sulla pelle non interessata dal callo. Contiene Acido Salicilico e Salicilati. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno. Formato Confezione da 9 pezzi. Cod. 02166