

## OPTIVE PLUS SOLUZIONE OFTALMICA 10ML

**Marchio:** OPTIVE  
**Codice Min.:** 5016007203868  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



optive PLUS Dispositivo medico. Soluzione sterile multidose, lubrificante e osmoprotettiva a tripla azione. Lubrifica la superficie oculare e idrata le cellule epiteliali ripristinando l'equilibrio osmotico e protegge il film lacrimale migliorando lo strato lipidico. Modalità d'utilizzo Porre 1 o 2 gocce nell'occhio interessato. Per evitare la contaminazione, non appoggiare la punta del flaconcino su alcuna superficie. Avvertenze Non usare il prodotto in caso di allergia ad uno dei componenti. Non ingerire la soluzione. Per evitare la contaminazione o una possibile lesione agli occhi, non appoggiare la punta del flaconcino su alcuna superficie ed evitare il contatto diretto con gli occhi. Chiudere bene il flaconcino immediatamente dopo l'uso. Tenere fuori della portata dei bambini. Non

usare il flaconcino se il sigillo posto sul collo del flaconcino dovesse risultare rotto prima dell'uso. Non usare se la soluzione cambia colore. Attendere 5 minuti prima di somministrare un altro prodotto ad uso oftalmico. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Periodo di conservazione dopo la prima apertura: 6 mesi. Componenti per 10 ml di soluzione Carbossimetilcellulosa sodica 0,5%; glicerina 1,0%; olio di ricino 0,25%; polisorbato 80 0,5%; levocarnitina 0,25%; eritritolo 0,25%; purite 0,01% come conservante. Formato Flaconcini di plastica da 10 ml.