

OTOL GOCCE AURICOLARI 20 ML

Marchio: DECA LABORATORIO
CHIMICO

Codice Min.: 937464636

Link: [clicca qui per acquistare](#)



OTOL Gocce auricolari Descrizione Dispositivo medico indicato per ammorbidire e quindi rimuovere meccanicamente le formazioni di cerume all'interno del condotto uditivo. Le proprietà del sodio Carbonato, sale di sodio dell'acido Carbonico unite alla glicerina, consentono ad OTOL di ammorbidire le presenze ceruminose facilitando la rimozione delle stesse. La presenza della glicerina permette di lubrificare il condotto uditivo. Componenti Acqua depurata glicerina, carbonato di sodio. Modalità d'uso - Bambini: instillare 4/5 gocce nel condotto uditivo per tre applicazioni giornaliere. Dopo l'instillazione delle gocce emollienti, il paziente dovrebbe rimanere sdraiato sul fianco opposto all'orecchio da trattare per 5-10 minuti.- Adulti: instillare 5/6 gocce nel condotto uditivo per quattro

applicazioni giornaliere. Dopo l'instillazione delle gocce emollienti, il paziente dovrebbe rimanere sdraiato sul fianco opposto all'orecchio da trattare per 5-10 minuti. Avvertenze Prima di utilizzare su bambini al di sotto dei 3 anni di età, consultare il medico al fine di una corretta diagnosi correlata alla formazione di cerume. Non utilizzare in caso di timpano perforato o di terapia farmacologica concomitante. Rimuovere eventuali apparecchi acustici prima di instillare le gocce. Pulire accuratamente il contagocce dopo l'utilizzo. Non utilizzare se allergici o ipersensibili ad uno dei componenti. Qualora il prodotto dia luogo a fenomeni di sensibilizzazione, interrompere il trattamento e consultare il medico. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso di contatto accidentale lavare gli occhi con abbondante acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Chiudere il flacone dopo l'uso. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro. Conservazione La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Richiudere il flacone dopo l'uso. Conservare a temperatura ambiente. Non esporre a fonti di calore. Non disperdere il contenitore nell'ambiente, non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Flacone da 20 ml. Cod. 150