

PASTA DI UREA ONYSTER 10 G + 21 CEROTTI

Marchio: PIERRE FABRE
DERMATOLOGIE

Codice Min.: 930861733

Link: [clicca qui per acquistare](#)



ONYSTER Dispositivo medico CE, classe I, raccomandato nell'ambito del trattamento topico delle micosi delle unghie di mani e piedi. Grazie alla composizione a base di urea al 40%, Onyster indebolisce solo le parti di unghia malata (a causa del fungo) che assicurano l'aderenza dell'unghia al letto ungueale. Questo indebolimento consente il distacco selettivo della parte malata dell'unghia, facilitandone il taglio e quindi l'asportazione, in preparazione al successivo trattamento antimicotico. Modalità d'uso Applicare una volta al giorno sull'unghia infetta la quantità di pomata necessaria a coprire l'intera superficie. Proteggere con un cerotto occlusivo per 24 ore. Ripetere l'applicazione della pomata e sostituire il cerotto ogni giorno, dopo aver eliminato la pomata in eccesso dalla

precedente applicazione. In base all'estensione dell'infezione e allo spessore dell'unghia, sono necessarie da 1 a 3 settimane di trattamento. Dopo 1-3 settimane di trattamento, si raccomanda di rivolgersi a un sanitario per il taglio con forbice da unghie della parte ammorbidita e staccata dell'unghia. Una volta asportata la parte infetta dell'unghia, si deve continuare con il trattamento antimicotico. Avvertenze Non utilizzare è ipersensibile (allergico) a uno dei componenti. In assenza di dati, è preferibile non utilizzare Onyster in associazione con altri prodotti per uso topico. Non utilizzare il prodotto senza avere consultato un sanitario. In caso di reazione di ipersensibilità (allergia), interrompere l'applicazione e informare il medico. Non ingerire. Non usare sulla cute lesa. Lavare le mani dopo l'uso. Non applicare vicino agli occhi o sulle mucose. I cerotti sono monouso e non devono essere riutilizzati. Non usare se la confezione è danneggiata o se, alla prima apertura, il tubo è privo del tappo di protezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Possibili effetti indesiderati Questo dispositivo medico in alcuni soggetti può causare effetti indesiderati: arrossamento, irritazione, macerazione, desquamazione (formazione di piccole squame che si staccano dalla superficie cutanea), possibilità di allergia, secchezza cutanea. Conservazione Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Componenti Urea; lanolina; vaselina bianca. Formato 1 tubo di pomata da 10 g + 21 cerotti. Cod. C21641