

POLIDENT AZIONE TOTALE 66 COMPRESSE PULITORE PER PROTESI QUOTIDIANO

Marchio: POLIDENT
Codice Min.: 975761356
Link: [clicca qui per acquistare](#)



POLIDENT AZIONE TOTALE Descrizione Pulitore per protesi quotidiano. Pulizia rapida e superiore, rimuove velocemente più macchie ed elimina il 99,9% dei batteri causa del cattivo odore. Ingredienti Sodium bicarbonate, sodium carbonate peroxide, citric acid, potassium caroate (Potassium monopersulfate), sodium carbonate, TAED, sodium benzoate, PEG-18, sodium lauryl sulfate, VP/VA copolymer, aroma, cellulose gum, CI 42090, CI 73015, CI 19140. Modalità d'uso 1. Introdurre una compressa di Polident Azione Totale in acqua molto calda (non bollente) in quantità sufficiente a ricoprire la protesi totale o parziale o il ponte mobile. 2. Dopo aver lasciato agire per 5 minuti, spazzolare la protesi con la soluzione usando uno spazzolino morbido. 3. Sciacquare bene la protesi con abbondante acqua corrente. Gettare la soluzione immediatamente dopo l'uso.

Avvertenze Non mettere le compresse né la soluzione in bocca. Non bere la soluzione pulente e non usarla come collutorio. Non toccare la bocca o gli occhi dopo aver maneggiato le compresse o la soluzione. Non usare se si è sensibili a un qualunque ingrediente contenuto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e da chi può accidentalmente ingerire la compressa o la soluzione. In caso di ingestione, contattare un centro antiveleni o un medico. In caso di irritazione, sospendere l'uso e consultare un medico. Provoca grave irritazione oculare. Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se presenti e se è agevole farlo; continuare a sciacquare. Se persiste l'irritazione degli occhi, consultare il medico. Contiene olio di menta piperita. Può causare reazione allergica. Formato Confezione da 66 compresse. Cod. 6000000011187