

## POLIDENT FREE ADESIVO PER PROTESI DENTARIA 40 G

**Marchio:** POLIDENT  
**Codice Min.:** 8016825972370  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



POLIDENT Free Aiuta a prevenire le infiltrazioni di cibo fra la gengiva e la protesi. Senza coloranti e conservanti. Senza aromi artificiali. Formulazione senza zinco. Polident Free fa parte della gamma di adesivi per protesi Polident senza sapore e privi di coloranti artificiali ed è formulato per offrire tenuta per tutto il giorno e un gusto neutro che non interferisce con il sapore dei cibi. La formulazione è inoltre priva di zinco. Anche se aderisce bene, la protesi può permettere infiltrazioni di cibo e provocare disagio. L'azione provata di Polident Free contribuisce a ostacolare queste infiltrazioni. Modalità d'uso Applicazione 1. Pulire e asciugare la protesi. 2. Applicare una piccola quantità di Polident Free in striscioline corte (vedere lo schema) non troppo vicine al bordo della

protesi. 3. Sciacquare la bocca prima di inserire la protesi. 4. Premere la protesi in posizione, tenerla ferma per qualche istante, quindi mordere per alcuni secondi per completare il fissaggio. 5. Non applicare più di una volta al giorno. Rimozione 1. Sciacquare la bocca con acqua. 2. Togliere lentamente la protesi con un movimento oscillatorio. 3. Rimuovere gli eventuali residui di crema adesiva dalla protesi e dalla bocca con acqua tiepida e uno spazzolino a setole morbide. 4. Usare un pulitore per protesi Polident per pulire a fondo la protesi. Formato Tubo da 40 g