

POLIDENT IMBATTIBILE ADESIVO PER PROTESI DENTARIA 40 G

Marchio: POLIDENT
Codice Min.: 8016825972387
Link: [clicca qui per acquistare](#)



POLIDENT Imbattibile Aumenta la capacità di masticazione migliorando la stabilità della protesi, per affrontare con disinvoltura ogni momento della giornata. Rinfresca l'alito. Aiuta a prevenire le infiltrazioni delle particelle di cibo sotto la dentiera. Non contiene zinco. Modalità d'uso Pulire la protesi dentale ed asciugarla con cura. Applicare la crema adesiva in piccole strisce non troppo vicine al bordo dell'aprotesi. Sciacquare la bocca prima di inserire la dentiera. Inserire la dentiera e tenerla premuta in posizione per qualche istante. Per rimuovere la dentiera: sciacquare la bocca con acqua. Togliere lentamente la dentiera con un movimento oscillatorio. Rimuovere gli eventuali residui di crema adesiva dalla dentiera e dalla bocca con acqua calda ed uno spazzolino a setole morbide. Usare un

pulitore specifico per protesi dentali per una pulizia profonda. Avvertenze Non usare in caso di sensibilità o reazioni nei confronti degli ingredienti del prodotto. Alcuni soggetti potrebbero essere sensibili a questa formulazione. Se si manifesta fastidio, sospendere l'uso del prodotto. Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto. Ingredienti Copolimero di vinilmentilene/acido maleico; sale parziale di sodio e calcio; paraffina solida; sodio carbossimetilcellulosa; paraffina liquida; propilparaben; aroma; CI 45430. Formato Tubo da 40 g.