

## POLIDENT IMBATTIBILE LUNGA TENUTA E DURATA ADESIVO PER PROTESI DENTALI 40 G

**Marchio:** Polident  
**Codice Min.:** 8016825972387  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



### POLIDENT IMBATTIBILE LUNGA TENUTA E DURATA ADESIVO PER PROTESI DENTALI 40 G

Polident Lunga tenuta e durata fa parte della gamma di adesivi per protesi Polident senza zinco ed è formulato per assicurare tenuta per tutto il giorno e offrirti il giusto comfort.

Anche se aderisce bene, la protesi può permettere infiltrazioni di particelle di cibo e ciò può provocare disagio. Ma l'azione di Polident Lunga tenuta e durata contribuisce ad ostacolare queste infiltrazioni fra la gengiva e la protesi.

#### Modo d'uso:

##### - Applicazione:

Pulire e asciugare la protesi.

Applicare una piccola quantità di Polident® Lunga tenuta e durata in piccole strisce (vedere lo schema) non troppo vicine al bordo della protesi.

Sciacquare la bocca prima di inserire la protesi.

Inserire la protesi in posizione, tenerla premuta e mordere per alcuni secondi per completare il fissaggio.

Non applicare più di una volta al giorno.

##### - Rimozione:

Sciacquare la bocca con acqua.

Togliere lentamente la protesi con un movimento oscillatorio.

Rimuovere gli eventuali residui di crema adesiva dalla protesi e dalla bocca con acqua tiepida e uno spazzolino a setole morbide.

Usare il pulitore per protesi Polident® per pulire a fondo la protesi.

#### Componenti:

Calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, aroma, propylparaben, CI 45430.