

POLIDENT LUNGA TENUTA 70 G

Marchio: POLIDENT
Codice Min.: 5054563009791
Link: [clicca qui per acquistare](#)



POLIDENT Lunga tenuta e durata Fa parte della gamma di adesivi per protesi Polident senza zinco ed è formulato per assicurare tenuta per tutto il giorno e offrirti il giusto comfort. Anche se aderisce bene, la protesi può permettere infiltrazioni di particelle di cibo e ciò può provocare disagio. Ma l'azione di Polident Lunga tenuta e durata contribuisce ad ostacolare queste infiltrazioni fra la gengiva e la protesi. Modalità

d'uso Applicazione Pulire e asciugare la protesi. Applicare una piccola quantità di Polident Lunga tenuta e durata in piccole strisce non troppo vicine al bordo della protesi. Sciacquare la bocca prima di inserire la protesi. Inserire la protesi in posizione, tenerla premuta e mordere per alcuni secondi per completare il fissaggio. Non applicare più di una volta al giorno. Rimozione Sciacquare la bocca con acqua. Togliere lentamente la protesi con un movimento oscillatorio. Rimuovere gli eventuali residui di crema adesiva dalla protesi e dalla bocca con acqua tiepida e uno spazzolino a setole morbide. Usare il pulitore per protesi Polident® per pulire a fondo la protesi. Formato Tubo da 70 g