

## POLIDENT TRIPLA FRESCHEZZA 66 COMPRESSE

**Marchio:** POLIDENT  
**Codice Min.:** 5054563009777  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



POLIDENT Tripla freschezza Le compresse Polident Tripla Freschezza eliminano la maggior parte dei batteri responsabili dei cattivi odori, eliminano le macchie più tenaci e contribuiscono a ridurre l'accumulo di placca, lasciando la protesi pulita, fresca e luminosa ogni giorno. Le compresse presentano una formula non abrasiva, per cui puliscono la protesi senza graffiarla, lasciando meno spazio per la proliferazione di batteri e altri microrganismi. Modalità d'uso Utilizzare una compressa in acqua tiepida (non calda) sufficiente a coprire completamente la protesi. Lasciare a bagno tutta la notte. Spazzolare la protesi con la soluzione servendosi di uno spazzolino a setole morbide. Sciacquare con acqua corrente. Scartare la soluzione residua immediatamente dopo l'uso. Formato 66 compresse