

PONTEFIX SET FISSAGGIO PONTI

Marchio: Fimo
Codice Min.: 908858234
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Pontefix Indicazioni Fissa provvisoriamente ponti, corone, denti a perno e capsule realizzati con ogni tipo di materiale. Modalità d'uso Eliminare con cura eventuali residui di materiale dall'interno della capsula, utilizzando un oggetto appuntito. Successivamente completare la pulizia con del cotone idrofilo imbevuto di alcool. Porre il rotolino di cotone fra la gengiva e la guancia, in prossimità del dente o del perno sul quale deve essere effettuato il fissaggio. Controllare quale sia il giusto verso della capsula per porla direttamente sul dente. Aprire il barattolo della polvere ed aggiungere tutto il liquido

contenuto nel monodose. Mescolare con la spatolina fino ad ottenere un composto omogeneo. Attenzione: il composto indurisce in circa due minuti; pertanto è necessario procedere rapidamente. Utilizzando la spatolina riempire a metà la capsula con il composto. Nel caso si tratti di un dente a perno, il composto dovrà essere applicato direttamente sul perno. Inserire la capsula sul dente in posizione corretta. Togliere il rotolino di cotone precedentemente inserito fra la guancia e la gengiva e porlo sopra la capsula fissata. Serrare i denti per circa cinque minuti. A fissaggio avvenuto, eliminare l'eccesso di composto fuoriuscito dalla capsula. Caratteristiche Cemento a base di ossifosfato di zinco, che garantisce la corretta fluidità del composto per evitare rialzi. Non pregiudica il successivo intervento del dentista. CE 0373. Avvertenze Il fissaggio non elimina le cause che hanno determinato la caduta, pertanto, nonostante l'ottima resistenza del prodotto, si consiglia, se persiste il problema, di rivolgersi al proprio medico dentista. Il composto ottenuto è sufficiente a fissare da una a quattro capsule in una sola volta. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.