

PROCTOIAL GEL RETTALE EMORROIDI RAGADI 30 ML

Marchio: -
Codice Min.: 920891557
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Proctoial GEL RETTALE Descrizione Dispositivo medico contenente acido ialuronico ad alto peso molecolare, MSM e tea tree oil formulati in un gel fresco e finalizzato all'applicazione sulla mucosa rettale. È indicato nei processi riparativi ano-rettali come nel caso di emorroidi e ragadi anali. L'acido ialuronico è un polisaccaride costituito da glicosaminoglicani a catena non ramificata largamente presente nel tessuto connettivo e che gioca un ruolo importante nella riparazione tissutale, in quanto accelera e modula i processi di riepitelizzazione susseguenti a lesioni di diversa origine ripristinando il tono e l'elasticità dei tessuti. MSM è una sostanza naturale presente sia nei vegetali sia

fisiologicamente nell'organismo umano, dotata di potere antiossidante ed in grado di migliorare gli effetti dell'acido ialuronico. Il tea tree oil (olio essenziale di *Melaleuca alternifolia*) contribuisce a proteggere il prodotto favorendo gli effetti dell'acido ialuronico. Proctoial è stato formulato utilizzando una matrice idrocellulosica e copolimérica per favorire un'elevata bioadesione alla mucosa rettale costituendo quindi un'efficace barriera protettiva dell'area lesa e infiammata. L'acido ialuronico contenuto in Proctoial svolge inoltre un'azione lubrificante che riduce il rischio di irritazioni, prurito bruciore e quindi il formarsi di lesioni da sfregamento che acquisiscono la patologia. Modalità d'uso Svitare il tappo, sfondare il sigillo di sicurezza con il retro-tappo ed avvitare la cannula endo-rettale, munita di cappuccio di protezione, sul collo del tubo stesso. Togliere il cappuccio e spremere fino a riempire la cannula facendo uscire una piccola quantità di prodotto per lubrificare la cannula. Inserire delicatamente la cannula nel retto. Spremere nuovamente il tubo sino ad introdurre una sufficiente quantità di prodotto. Applicare Proctoial anche sulla zona esterna. Dopo l'uso, pulire accuratamente la cannula e ricoprirla con il cappuccio. Applicare Proctoial da due a tre volte al giorno e quando possibile dopo ogni evacuazione. Continuare l'applicazione per 1-2 settimane fino alla scomparsa della sintomatologia. Componenti Aqua, sorbitol, propylene glycol, glycerin, hydroxyethylcellulose, methylsulfonilmethane (MSM), benzyl alcohol, sodium hyaluronate, PVM/MA copolymer, tea tree oil (*Melaleuca alternifolia* oil), phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, disodium EDTA. Avvertenze Non utilizzare il dispositivo medico dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare il dispositivo se all'atto del primo impiego l'imballo esterno od il sigillo di sicurezza risultino danneggiati. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea. In caso di sanguinamento, consultare il medico prima dell'impiego di qualsiasi trattamento. Qualora dopo il trattamento i sintomi persistano consultare il medico. Evitare l'uso promiscuo. L'uso del prodotto è

consentito solo in soggetti adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Si consiglia di condurre un accurato lavaggio delle aree interessate prima dell'applicazione. Dopo l'applicazione si consiglia di evitare l'evacuazione per almeno 20-30 minuti per non provocare una precoce rimozione di Proctoial. Nell'impossibilità si consiglia di ripetere l'applicazione dopo l'evacuazione ed un accurato lavaggio delle parti interessate. Non sono note al momento interazioni tra Proctoial e farmaci normalmente utilizzati nella terapia di emorroidi o ragadi anali. Controindicato nei casi di ipersensibilità individuale accertata verso i componenti presenti. Poiché non sono disponibili dati completi, il prodotto non è raccomandata durante la gravidanza se non nei casi di effettiva necessità e sotto diretto controllo del medico curante. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità post-apertura: 3 mesi. Formato Tubo da 30 ml munito di applicatore rettale monouso Cod. 7101AVIT