

PRONTOSAN OTC SOLUZIONE DETERGENTE PER LESIONI CRONICHE 350ML

Marchio: B.Braun
Codice Min.: 904649668
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Prontosan Diapositivo medico CE di classe III, soluzione detergente per ferite, con poliesanide e betaina per la pulizia e decontaminazione delle ferite con patina. Penetra il biofilm e scioglie la patina. Soluzione pronta all'uso con poliesanide e betaina deterge e umetta ferite acute e croniche nonché ustioni di grado 1 e 2. Scioglie le patine di fibrina salvaguardando i tessuti, disgrega i biofilm, impedisce la riformazione dei biofilm, distacca i residui di medicazioni. Ideale per la preparazione del letto di ferita, non interferisce con la granulazione ed epitelizzazione ha una tollerabilità elevata per cellule e tessuti. Indicato per l'uso ripetuto e a lungo termine. Applicazione indolore. Componenti 0,1 % poliesanide; 0,1 % betaina; 99,8 % acqua purificata; glicerolo, idrossietilcellulosa. Controindicazioni -

Allergie note o sospette. - non usare nella regione del SNC e delle meningi, nell'orecchio medio e interno e negli occhi. - uso su cartilagine ialina e negli interventi asettici su articolazioni. - non mescolare con altri saponi, unguenti, oli, enzimi ecc. per detersione delle ferite. Modalità d'uso Utilizzare per l'irrigazione direttamente dal flacone, oppure per la fase umida-asciutta. - Riscaldare a temperatura corporea (ad es. in scaldabiberon). - Per la fase umida-asciutta applicare la compressa di garza abbondantemente inumidita su e oltre i bordi della ferita. - Compatibile con le principali medicazioni per ferite disponibili in commercio (eccezione: vermi). - Adatto anche per ferite infette. - Uso raccomandato nella V.A.C. Instill Therapy. Conservazione Conservabilità: 8 settimane dall'apertura. Formato Flacone da 350 ml. Cod.400417