


PROTEFIX CUSCINETTO SUPERIORE 30 PEZZI

Marchio: -
Codice Min.: 902465881
Link: [clicca qui per acquistare](#)

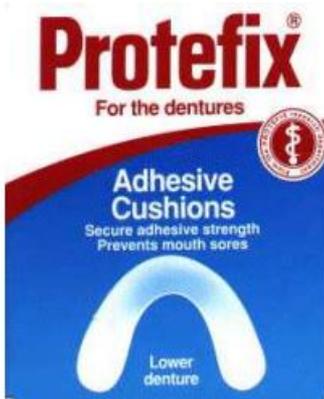

Protefix CUSCINETTI ADESIVI PER PROTESI INFERIORE E SUPERIORE Indicazioni: protegge le gengive dalle irritazioni, blocca la protesi per tutto il giorno e combatte i cattivi odori della bocca. Il morbido cuscinetto una volta bagnato aumenta di volume ed elimina gli spazi vuoti tra la protesi e la gengiva eliminando l'eventuale attrito sulle mucose prevenendo lacerazioni, irritazioni e vesciche. Protefix contiene un adesivo innovativo estratto dalle alghe marine, protettivo e anti-allergico. Modalità d'uso: 1) Inumidire il cuscinetto immergendolo per 10 secondi in acqua tiepida. 2) Applicare il cuscinetto alla protesi controllandone la misura, stendendo con le dita eventuali pieghe. 3) Se necessario ritagliare la parte che eccede mantenendo il cuscinetto in posizione. Non tagliare

troppo il cuscinetto. Un cuscinetto troppo piccolo non é sufficientemente adesivo. 4) Premere il cuscinetto sulla protesi cominciando dal centro con entrambe le dita fino a che non sia ben appoggiato, liscio e perfettamente aderente. Quindi dopo qualche minuto di pressione, applicarla. 5) Se durante la giornata l'adesività diminuisce, togliere la protesi e cospargere il cuscinetto con Protefix polvere. 6) A fine giornata togliere il cuscinetto sollevandone un lato ed estraendolo. Cod. PROTEFIX04 / PROTEFIX05