

RESOLVE CICATRICI GEL SILICONE 20 G

Marchio: RESOLVE
Codice Min.: 8032956141157
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Resolve gel Dispositivo Medico CE, classe I, utile per la prevenzione ed il trattamento delle cicatrici ipertrofiche e cheloidi perchè sfrutta i fisiologici processi di rimodellamento della cute. Interviene su cicatrici ipertrofiche e cheloidi, anche di vecchia data, riducendone la vistosità (riduzione delle dimensioni e miglioramento del colore) in otto settimane. Il funzionamento è di tipo meccanico: grazie all'ambiente favorevole, creato da occlusione-idratazione, si previene la formazione di cicatrici ipertrofiche. Può essere usato per cicatrici derivanti da ferite chirurgiche, parto cesareo, abrasioni ed escoriazioni, ustioni, acne. Gel trasparente a base di silicone. Può essere utilizzato anche su punti molto evidenti del corpo, come il viso.

L'aggiunta di vitamina E aiuta a combattere la formazione di cicatrici ipertrofiche. Modalità di utilizzo Pulire e asciugare bene la cicatrice. Applicare con cura uno strato sottile sulla cicatrice. Attendere 5-10 minuti prima di coprire la cicatrice con eventuali indumenti per evitare di sporcarli. Ripetere il trattamento 3-4 volte al giorno per mantenere una perfetta pellicola sulla cicatrice. Si consiglia di continuare il trattamento per almeno 2 mesi al fine di ottenere il miglior risultato estetico. Avvertenze Deve essere applicato esclusivamente su ferite chiuse (a scopo preventivo) oppure su ferite cicatrizzate (riduzione della cicatrice formata). Non applicare su mucose, vicino agli occhi, su pelle trattata con farmaci sotto forma di creme, pomate, unguenti. In caso di comparsa di arrossamento o irritazione sospendere immediatamente il trattamento e consultare il proprio medico o il farmacista. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno. Formato 15 g. Cod. 20540