

RINOAIR ISO SPRAY NASALE ISOTONICO 50 ML

Marchio: Shedir Pharma
Codice Min.: 931927180
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Rinoair Iso Spray Descrizione Dispositivo medico per la rimozione dei residui di muco dalle fosse nasali in bambini e adulti. Per un'azione decongestionante del naso chiuso. Utilizzare come complemento ai trattamenti delle affezioni otorinolaringoiatriche e per un'azione preventiva contro il rischio di piú contaminazioni microbiche. Ingredienti Acqua, N-Acetilcisteina, MSM, Beta-glucano, Sodio cloruro, Resveratrolo. Coformulanti: Acido citrico, Sodio benzoato, Potassio sorbato, Sodio deidroacetato, Polisorbato 20. Modalità d'uso Agitare bene il flacone prima dell'uso; rimuovere la protezione dall'erogatore; premere l'erogatore fino ad ottenere una nebulizzazione uniforme; nel caso di bambini, tenere il capo leggermente piegato sul lato opposto alla narice nella quale si immetterà lo spray; posizionare delicatamente il beccuccio all'imbocco della narice e premere con 2 dita sulla base dell'erogatore; ripetere la procedura nell'altra narice; pulire l'erogatore; rimettere

la protezione sull'erogatore. Dosaggio: 2-3 spruzzi per narice secondo necessità fino ad un massimo di 4 applicazioni al giorno o salvo diversa indicazione del medico. Avvertenze Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità verso uno o piú degli ingredienti. L'uso dello stesso flacone da parte di piú soggetti può facilitare la trasmissione di infezioni. Da utilizzare secondo parere medico in presenza di problemi cronici al naso. In caso di mucose nasali fortemente irritate, si può verificare un leggero formicolio durante l'uso. Se i sintomi persistono avvertire il medico o il farmacista. Evitare il contatto con gli occhi, in caso contrario lavare con acqua. Utilizzare il prodotto entro 28 giorni dal primo spruzzo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Il periodo di validità si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato. Formato Flacone da 50 ml.