

RINOFLUX SOLUZIONE FISIOLGICA 20 FIALE 2 ML

Marchio: PIC
Codice Min.: 8058664007547
Link: [clicca qui per acquistare](#)



RinoFluxPiC Dispositivo medico CE0373. Preparato sterile composto da sodio cloruro e acqua purificata. La fiala è sterile e pronta all'uso, pratica da utilizzare e da tenere a portata di mano. Può essere utilizzata anche per un periodo prolungato in quanto non presenta controindicazioni. Il prodotto è in fiale monodose. Si consiglia di utilizzare in una sola volta allo scopo mantenere inalterate le caratteristiche di sterilità. La soluzione fisiologica è indicata: - in aerosolterapia da sola, come fluidificante delle secrezioni per umidificare le mucose nasali. - Per la pulizia del naso, negli adulti, in caso di abbondanti secrezioni nasali e nei bambini che non sono in grado di soffiarselo autonomamente. - Per l'igiene quotidiana delle mucose nasali, allo scopo di prevenire ostruzioni dovute al ristagno di

secrezioni. - Per facilitare il drenaggio delle secrezioni in eccesso, in caso di raffreddore. - può essere utilizzata anche per la pulizia esterna degli occhi. Modalità d'uso Per la pulizia del naso: aprire il flaconcino sterile ruotando la chiusura a farfalla; inclinare la testa verso sinistra, nel caso di un bambino metterlo su un fianco, sostenendo la testa con la mano, appoggiare delicatamente l'imboccatura del flaconcino alla narice superiore ed irrigare abbondantemente di soluzione. Ripetere l'operazione con l'altra narice. Attendere qualche momento affinché la soluzione agisca. Rimuovere le secrezioni con un fazzoletto, nel caso di un bambino sollevarlo e rimuovere le secrezioni con un fazzoletto o con l'aspiratore nasale. Utilizzare tutte le volte che lo si ritiene necessario, comunque secondo le indicazioni del medico. In aerosolterapia: Aprire il flaconcino sterile ruotando la chiusura a farfalla. aprire l'ampolla dell'aerosol girandola in senso antiorario; inserire la quantità di soluzione desiderata. Richiudere l'ampolla dell'aerosol girandola in senso orario e attaccare gli altri accessori necessari(tubo di raccordo, maschera o boccaglio); iniziare l'applicazione. Componenti Cloruro di sodio 0,9%; acqua sterile q. b. a 100 ml. Avvertenze Per uso esterno. Non iniettabile. Prodotto sterile solo se la confezione è integra non danneggiata. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, non esporre a fonti di luce e calore. Formato Confezione da 20 flaconcini da 2 ml. Cod. 0003910102030