

## RINOTUX SPRAY NASALE 50 ML

**Marchio:** Laboratori Nutriphyt  
**Codice Min.:** 927586343  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**RINOTUX Spray Nasale** Descrizione Dispositivo medico per una corretta igiene nasale. Riduce la secchezza idratando le vie nasali. Coadiuvante nelle affezioni ORL. Contro gli stati di irritazione causati da agenti esterni da inquinamento ambientale. Coadiuvante nel trattamento dell'edema associato a riniti e sinusiti. Componenti Acqua depurata, sodio fosfato bibasico, N-acetilcisteina, sodio fosfato monobasico, ribes estratto glicerico, arnica estratto glicerico, camomilla estratto glicerico, grindelia estratto glicerico, resveratrolo, metil-sulfonil metano, potassio sorbato, sodio benzoato, fenilcarbinolo, EDTA sale tetrasodico, polisorbato 20, sodio ialuronato, camomilla romana, sodio idrossido. Modalità d'uso Dosaggio: 2 spruzzi per narice 3-4 volte al giorno salvo diverso parere medico. Togliere il cappuccio di protezione dall'erogatore.

Posizionare il beccuccio all'imbocco della narice. Premere con due dita la base dell'erogatore. Effettuare l'operazione in entrambe le narici. Pulire l'erogatore. Rimettere il cappuccio sull'erogatore. Avvertenze Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non superare la dose consigliata senza il parere del medico. Non somministrare ai bambini al di sotto dei 2 anni d'età. Evitare il contatto con gli occhi, in caso contrario lavare con acqua. In caso di forte irritazione delle mucose, può verificarsi un leggero formicolio dopo l'uso. Se i sintomi persistono avvertire il medico o il farmacista. Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto ( Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Formato Flacone da 50 ml con erogatore nasale spray.