

## SAGINIL IN 10 CANNULE TUBO 60 ML

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 978305682  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Saginil in Cannule vaginali** Descrizione Dispositivo medico normalizzante della reattività della mucosa vaginale. Trova utile indicazione nel trattamento della sintomatologia da iper-reattività mucosale indotta da utilizzo di antisettici in corso di vaginiti e da manovre di posizionamento di sistemi contraccettivi. Risulta particolarmente indicato nel controllo della sintomatologia vaginale conseguente all'uso di farmaci anti-estrogenici per il trattamento adiuvante in donne affette da neoplasia mammaria. Saginil in cannule vaginali interviene sul mantenimento dell'integrità morfo-funzionale della mucosa vaginale per contrastare l'innesco e l'amplificazione della sequela di eventi tissutali che caratterizzano, a livello locale, l'iper-

reattività mastocitaria. Saginil in cannule vaginali è in grado, inoltre, di controllare i fenomeni di ricorrenza che frequentemente si instaurano in seguito a vaginiti di differente eziologia. Modalità d'uso In caso di trattamento per vaginiti, si consiglia l'uso di una cannula a giorni alterni (preferibilmente la sera) per 10 o 20 giorni o secondo indicazioni dello specialista. In caso di trattamento in donne in terapia anti-estrogenica, si consiglia una cannula al giorno fino ad attenuazione o remissione sintomatologica. L'uso del prodotto può essere effettuato in associazione al trattamento farmacologico in corso. 1) Lavarsi accuratamente le mani. Al primo utilizzo, svitare il tappo del tubo, ruotarlo e usare la parte appuntita per forare il sigillo di alluminio. Non utilizzare se il sigillo è rotto. 2) Estrarre una cannula dall'involucro protettivo e avvitarla all'imbobatura del tubo facendo attenzione a mantenere in asse i due componenti. 3) Premere sul tubo in modo da riempire la cannula con il gel fino a completo riempimento, ossia fino a quando il pistoncino si arresta. 4) Svitare la cannula dal tubo e riposizionare il tappo sul tubo. 5) Per l'applicazione, sdraiarsi, inserire delicatamente l'estremità della cannula in profondità in vagina e svuotare il contenuto spingendo lentamente il pistone fino in fondo. Estrarre la cannula e gettarla dopo l'utilizzo. Avvertenze Evitare il contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente in caso di contatto oculare accidentale. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è indicato per i soggetti già sensibilizzati ai componenti presenti nella formulazione. Usare preferibilmente entro la data indicata sulla confezione. Saginil in cannule vaginali non interagisce con i trattamenti farmacologici comunemente adottati nella terapia delle vaginiti; per il suo uso contemporaneo consultare comunque il proprio medico. Nel periodo di trattamento, si consiglia l'uso del detergente Saginil Detergente intimo. Conservazione Conservare ad una temperatura non superiore a 40°C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Gel vaginale tubo da 60 ml + 10 cannule vaginali monouso riempibili a 5 ml. Cod. 6029