

## SAME PLAST CEROTTO 7 X 20 CM PER CICATRICI

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 935702466  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Same plast cerotto** Dispositivo medico costituito da uno strato di silicone medicale applicato su un supporto conformabile. Indicazioni Il prodotto contribuisce a prevenire la formazione di cicatrici ipertrofiche o di cheloidi e a migliorarne l'aspetto estetico. Modalità d'utilizzo Aprire la confezione e prelevare la medicazione dalla busta in carta. Tagliare una striscia di medicazione di lunghezza adeguata alla cicatrice da trattare, assicurando che la medicazione copra l'area

interessata con un margine di almeno 1 cm. Riporre nell'apposita bustina trasparente la parte di cerotto non utilizzata e conservarla nell'astuccio con le istruzioni. Rimuovere la pellicola protettiva e applicare il prodotto su cute asciutta e pulita. Si consiglia un uso continuativo, rimuovendo la medicazione almeno una volta al giorno. La stessa medicazione può essere riapplicata da una a due volte al giorno fino ad un massimo di 7 giorni. All'atto della rimozione per successivo riutilizzo, il prodotto va appoggiato su una superficie liscia, asciutta e pulita con il lato non adesivo. In presenza di una perdita di adesività occorre sostituire la striscia. Il periodo minimo di trattamento raccomandato è di 30 giorni. Il prodotto può essere utilizzato nell'ambito di procedure di trattamento delle cicatrici e dei cheloidi che prevedono l'uso di gel o creme aventi funzioni specifiche. Avvertenze Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente su cicatrici chiuse e lesioni completamente guarite. Accertarsi della completa rimozione di punti e suture e della completa guarigione della ferita prima di applicare il dispositivo. Una volta applicato il cerotto deve essere destinato ad un uso esclusivamente personale. Durante il ciclo di trattamento non esporre la cicatrice non protetta ai raggi solari diretti. In caso di insorgenza di arrossamento, prurito o irritazione cutanea, sospendere il trattamento e rivolgersi al medico o al farmacista. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Validità: 5 anni. Formato Dimensioni: 7x20 cm