

## SILVER BLU R SPRAY NASALE 50 ML

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 934446194  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



SILVER BLU R SPRAY Contrasta la proliferazione batterica e fungina. SILVER BLU è un Dispositivo Medico a base di argento microcolloidale processato con stabilizzante naturale che contrasta la proliferazione batterica e fungina ed è destinato a Uso Cutaneo o per le Mucose Orali e Nasali. **INDICAZIONI:** Contrasta la proliferazione batterica e fungina ed è destinato a Uso Cutaneo o per le Mucose Orali e Nasali. **COMPOSIZIONE:** Acqua Bi-distillata, Argento Colloidale. Il prodotto non contiene derivati del petrolio, laurilsolfati, coloranti, conservanti, profumi, prodotti di sintesi e derivati animali, OGM. **MODO D'USO:** Inserire il nebulizzatore, che si trova all'interno della scatola, sopra l'apposito erogatore. Tenere il flacone in posizione verticale, introdurre nella narice

l'estremità del nebulizzatore con movimento rapido e deciso. Una - due nebulizzazioni per narice. **POSOLOGIA:** Utilizzare Silver Blu 2-3 volte al giorno. **EFFETTI COLLATERALI:** Il prodotto Silver Blu se si usa nei modi e nei tempi consigliati non ha riscontrato nessun effetto collaterale, finora non sono state neppure segnalate interazioni con altri farmaci. Non adoperare insieme a composti clorurati, Le prove eseguite sul prodotto ad oggi non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione. È necessario far presente che ad assunzioni elevate e prolungate del prodotto, si può incorrere ad argiria, una colorazione grigio-blu della pelle e delle mucose dovuta ai composti dell'argento depositatisi nei tessuti. **AVVERTENZE:** Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso l'Argento. In caso di reazioni avverse sospendere l'utilizzo del prodotto e contattare il medico. Richiudere bene il contenitore dopo l'utilizzo. Tenere il prodotto al riparo da luce e campi elettromagnetici. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato. Il prodotto è destinato a Uso Cutaneo o per le Mucose Orali e Nasali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. **CONSERVAZIONE:** Conservare lontano da luce, calore e onde elettromagnetiche. Richiudere bene il contenitore dopo l'utilizzo. **CONFEZIONE:** Flacone in Vetro Blu Cobalto da 50 ml con apposito applicatore. **Fabbricante:** REGARD S.r.l. **Sede legale:** Via Cà del Vento, 24 - 48012 Bagnacavallo (RA) **Distributore:** BIOGROUP Srl - Variante esterna, snc 86091 Bagnoli del Trigno (IS) **Tel.** +39 0874 870014 - **Fax** +39 0874 870973 **www.biogroup.it** - **info@biogroup.it** **CE Dispositivo Medico** Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. **Data Ultima Revisione:** Novembre 2014.