

## SOLUZIONE DA NEBULIZZARE 15 FIALE 2 ML

**Marchio:** IALOCLEAN  
**Codice Min.:** 931204503  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**IALOCLEAN SOLUZIONE DA NEBULIZZARE** soluzione sterile da nebulizzare a base di acido ialuronico che esercita un effetto protettivo e di barriera nei confronti della mucosa rino-oro-faringea soggetta ad arrossamenti ed infezioni. L'acido ialuronico infatti aderisce sulla superficie della mucosa e, trattenendo l'acqua fisiologicamente presente, forma una pellicola protettiva che dona sollievo alla mucosa irritata. L'azione lubrificante ed emolliente permette di alleviare tutti quei sintomi legati all'infiammazione quali la deglutizione difficoltosa, la sensazione di corpo estraneo in gola, di solletico o di secchezza. Infine l'effetto barriera consente di conservare l'integrità della mucosa proteggendola da agenti esterni nocivi e dai patogeni. Modalità d'utilizzo Adulti e bambini di età

superiore ai 6 anni: un contenitore monodose per seduta 2 volte al giorno. Bambini di età 2-6 anni: metà contenuto di un contenitore monodose per seduta 2 volte al giorno. Il contenitore reca una graduazione corrispondente a metà dose. Non superare le dosi consigliate. Somministrare la soluzione mediante gli apparecchi per aerosol terapia (esclusivamente a pistone e non ad ultrasuoni). Lavarsi le mani prima e dopo l'uso del dispositivo medico. Per l'utilizzo eseguire le seguenti operazioni: - 1 Flettere il contenitore monodose nelle due direzioni e staccarlo dalla striscia cui è saldato. - 2 Agitare leggermente il contenitore monodose prima dell'uso. - 3 Aprire il contenitore monodose ruotando. - 4 Esercitando una moderata pressione sulle pareti del contenitore monodose far uscire la soluzione secondo la quantità indicata ed immetterla nell'ampolla del nebulizzatore. - 5 In caso di utilizzo di metà dose, il contenitore può essere richiuso capovolgendo e premendo il tappo. Il contenitore monodose richiuso deve essere conservato a temperatura compresa fra 2°C e 8°C (in frigorifero) e la quantità rimasta deve essere utilizzata entro 24 ore dalla prima apertura. Si può utilizzare in qualunque momento della giornata senza particolari restrizioni di tempo ed orari. La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi; se necessario ai fini del miglioramento dei sintomi, il prodotto può essere assunto per periodi prolungati. Componenti Acido ialuronico sale sodico, estratto di camomilla, EDTA, N-acetilcisteina, sodio domo, sodio idrossido, sodio fosfato monobasico biidrato, sodio fosfato bibasico eptaidrato, acqua. Avvertenze Prodotto controindicato all'uso nei bambini di età inferiore ai due anni. Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto. La sicurezza d'uso del prodotto durante la gravidanza e l'allattamento non è stata dimostrata. In tali circostanze, si consiglia di consultare il parere del proprio medico. L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Qualora si riscontrassero effetti indesiderati, descritti e non nel foglio illustrativo, informare il proprio medico o il farmacista. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi. L'eventuale presenza di un odore sulfureo non indica alterazioni del preparato ma è propria di un componente della formulazione. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservazione La data di scadenza è indicata sulla confezione, sulla busta di alluminio e sui singoli contenitori monodose; si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. I contenitori monodose devono essere conservati dentro la busta di protezione, al riparo dalla luce e dal calore. In caso di utilizzo di metà dose, il contenitore monodose richiuso va conservato a temperatura compresa fra 2°C e 8°C (in frigorifero) ed utilizzato entro 24 ore dall'apertura. I dispositivi medici non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i dispositivi medici non più utilizzati. Formato 15 contenitori monodose da 2 ml. Cod.14