

SOLUZIONE FIOLOGICA NASALE OCULARE AEROSOLTERA 20 X 5 ML

Marchio: ISOMAX
Codice Min.: 939562272
Link: [clicca qui per acquistare](#)



ISOMAX soluzione fisiologica Descrizione Dispositivo medico CE sterile, classe IIa. Utile per la detersione nasale, oculare e per aerosolterapia di neonati, bambini e adulti. Utilizzo nasale: nei bambini, la soluzione fisiologica facilita la pulizia del naso, spesso ostruito dal muco. Favorisce l'eliminazione delle secrezioni in eccesso. Negli adulti, grazie alla sua azione umidificante, allevia la sensazione di secchezza del naso. Utilizzo oculare: la soluzione fisiologica può essere utilizzata per l'igiene oculare dei neonati tramite instillazione. La soluzione fisiologica è indicata anche per l'igiene oculare dei bambini ed adulti tramite lavaggio, bagni oculari o applicazione di bende o cotone imbevute. Utilizzo per inalazione: la soluzione fisiologica è indicata per umidificare le vie respiratorie superiori

ed inferiori. Questa soluzione può essere utilizzata con apparecchi per aerosol sia pneumatici che ad ultrasuoni. Può essere usato ogni qualvolta sia necessario, senza alcun rischio in caso di utilizzo prolungato. Modalità d'uso Utilizzo nasale: introdurre il flaconcino monodose nella narice, tenendo la testa leggermente piegata, e premere delicatamente. Soffiarsi successivamente il naso. Utilizzo oftalmico: instillare qualche goccia nell'occhio esercitando una minima pressione del flaconcino ed asciugare con una garza sterile. In caso di trattamenti con farmaci a somministrazione nasale od oculare, è necessario utilizzare la soluzione fisiologica prima della loro assunzione e non dopo. Utilizzo per inalazione: versare la soluzione nell'apparecchio attenendosi alle istruzioni riportate dal produttore dell'apparecchio per aerosol. Se ISOMAX viene utilizzato per diluire farmaci, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel foglietto interno del medicinale. Componenti per 100 ml Sodio cloruro 0,9 g, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml. Avvertenze La soluzione contenuta in ciascun flacone deve essere utilizzata subito dopo l'apertura; la fiala aperta, qualora non usata, deve essere eliminata. Non utilizzare lo stesso flacone monodose sia per l'igiene nasale che oculare. Non iniettabile. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Formato 20 flaconcini da 5 ml. Cod. GA0683