

SOLUZIONE GEL 4000 30 ML

Marchio: BRUSCHETTINI
Codice Min.: 900532716
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Gel 4000 SOLUZIONE STERILE Grazie alla possibilità di far aderire un vetro di contatto alla cornea, mediante detta soluzione, é possibile esplorare l'angolo irido-corneale e il fondo oculare. É inoltre possibile, sempre usando il Gel 4000, effettuare con il laser interventi di: - iridotomia; - iridoplastica; - trabeculoplastica; - capsulotomia: - vitreolisi; - fotocoagulazione retinica. Utilizzando la soluzione Gel 4000 sulla sonda é, infine, eseguibile la ultrasonografia del globo oculare. Modalità d'uso Il prodotto non deve essere utilizzato oltre i trenta giorni dopo la prima apertura del contenitore. L'uso del prodotto é riservato all'oculista. Caratteristiche é una soluzione acquosa sterile al 2% di idrossipropilmetilcellulosa corrispondente, alla temperatura di 20 C, ad un

grado di viscosità pari a 4000 cPs (centipoise). Il Gel 4000 é caratterizzato dalle seguenti proprietà chimico-fisiche: - é perfettamente trasparente; - é solubile in acqua in tutte le proporzioni; - non forma precipitati insolubili con sali metallici o residui organici eventualmente presenti; - é stabile a pH compresi tra 2 e 13. Componenti Idrossipropilmetilcellulosa; sodio cloruro; sodio mertiolato; acqua depurata sterile. Formato 30 ml. Cod. 66