


SOLUZIONE OFTALMICA ECTOAL FLACONE 10 ML

Marchio: ALFA INTES
Codice Min.: 932220852
Link: [clicca qui per acquistare](#)

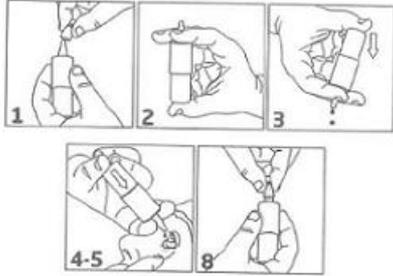

Ectoal Ectoina 2% Soluzione oftalmica Dispositivo medico CE, classe I sterile, che contiene Ectoin al 2%, una molecola naturale cito-protettiva, che ha proprietà antiinfiammatorie e stabilizza le membrane cellulari. È una soluzione isotonica e può essere utilizzato per trattare e prevenire i sintomi delle congiuntiviti allergiche. Prurito, rossore o eccessiva lacrimazione possono essere efficacemente alleviati. Protegge dagli effetti dannosi degli allergeni e supporta i processi di riparazione della congiuntiva irritata e sensibilizzata. Modalità di utilizzo Salvo diversa prescrizione medica, applicare 1-2 gocce per occhio anche più volte al giorno. Al momento della somministrazione i bambini di età uguale o inferiore a 10 anni dovrebbero essere aiutati da un adulto. 1. Rimuovere il

tappo protettivo del flacone, evitando di toccare la punta del contagocce sottostante. 2. Mettere l'indice ed il medio sulla placca circolare nella parte superiore del flacone ed il pollice sotto il flacone. 3. Prima di usare Ectoal per la prima volta, girare il flacone verso il basso e premere la base con il pollice 2-3 volte, fino alla fuoriuscita delle prime gocce. Non tagliare la punta del contagocce. 4. Inclinare la testa all'indietro e con l'indice spingere delicatamente la palpebra inferiore verso il basso e guardare in alto. Evitare il contatto diretto della punta del contagocce con le dita, la superficie dell'occhio o eventualmente la lente a contatto. 5. Applicare Ectoal nel sacco congiuntivale, premendo il flacone con fermezza una volta. Grazie al meccanismo a pompa brevettato sarà rilasciata esattamente una sola goccia. 6. Chiudere l'occhio lentamente per favorire la distribuzione della soluzione su tutta la superficie oculare. 7. Ripetere la procedura per l'altro occhio. 8. Dopo ciascun uso, asciugare la punta del flacone e richiudere con il tappo protettivo. Avvertenze Non deve essere utilizzato dopo la chirurgia oculare. Non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità all'ectoina o a qualunque altro degli ingredienti della soluzione oftalmica. Se si verifica una reazione allergica, l'uso deve essere immediatamente interrotto. Per garantire l'igiene, ciascun flacone deve essere utilizzato da una sola persona. Può essere utilizzato con le lenti a contatto. Non è nota alcuna interazione con le lenti a contatto. Non sono note interazioni tra Ectoal ed altri colliri o unguenti per uso topico oculare. Attendere almeno 15 minuti dopo aver utilizzato Ectoal prima di applicare qualunque altro dispositivo medico o farmaco nell'occhio. Consultare il proprio medico o farmacista prima di utilizzare questo dispositivo medico in caso di sospetta gravidanza, gravidanza o allattamento. Conservazione Conservare a temperatura compresa tra 2°C e 25°C. Non utilizzare per più di 6 settimane dopo la prima apertura. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Componenti Ectoin; idrossietilcellulosa; cloruro di sodio; acqua; tampone citrato. Formato Flacone da 10 ml. Cod. 598 Numero di registrazione marchio CE 0123