

SOLUZIONE OFTALMICA OPTIVE FUSION FLACONE 10 ML

Marchio: OPTIVE
Codice Min.: 5016007204568
Link: [clicca qui per acquistare](#)



optive FUSION Dispositivo Medico CE 0459, classe IIa. Soluzione sterile multidose per un immediato sollievo fastidio e bruciore oculare, un comfort superiore e una prolungata osmoprotezione dai sintomi dell'occhio secco. Compatibile con le lenti a contatto. Contiene PURITE, un conservante che, una volta instillato, si trasforma nei naturali componenti lacrimali dell'occhio. Modalità di utilizzo Porre 1 o 2 gocce nell'occhio(i) interessato(i). Chiudere bene il flaconcino immediatamente dopo l'uso. Avvertenze Interrompere l'uso del prodotto e consultare il medico in caso di dolore oculare, modifiche della vista, persistente rossore o irritazione oculare, o se le condizioni peggiorano. Tenere fuori della portata dei bambini. Non usare il prodotto in caso di allergia ad uno dei componenti.

Non ingerire la soluzione. Per evitare la contaminazione o una possibile lesione agli occhi, non appoggiare la punta del flaconcino su alcuna superficie ed evitare il contatto diretto con gli occhi. Non usare dopo la data di scadenza indicata sul prodotto. Non usare il flaconcino se il sigillo posto sul collo del flaconcino dovesse risultare rotto prima dell'uso. Non usare se la soluzione cambia colore. Attendere 5 minuti prima di somministrare un altro prodotto ad uso oftalmico. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Dopo 6 mesi dalla prima apertura, eliminare l'eventuale soluzione rimasta. Componenti 10 ml di soluzione contengono: sodio ialuronato 0,1%; carbossimetilcellulosa sodica 0,5%; glicerina 0,9%; eritrolo 0,5%; purite 0,01% come conservante. Formato Flacone da 10 ml. Numero di registrazione marchio CE 0459