

## SOLUZIONE PER LENTI A CONTATTO CONTACTA 2 PEZZI 360 ML

**Marchio:** CONTACTA  
**Codice Min.:** 930000411  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**CONTACTA SOLUZIONE UNICA PER LENTI A CONTATTO** DescrizioneLa soluzione unica per lenti a contatto Contacta Solution è isotonica, sterile, contenente Poliesametenbiguanide come principio attivo conservante. È un ottimo alleato nella manutenzione delle lenti a contatto, grazie alla sua capacità di detergere, disinfettare, idratare, risciacquare e conservare le lenti a contatto morbide. Adatta a tutti i tipi di lenti a contatto morbide. Anche per occhi sensibili. Modalità d'uso1. Lavare accuratamente le mani. Togliere le lenti dagli occhi, versare alcune gocce di Contacta Solution sulla lente e massaggiare sul palmo della mano per alcuni secondi. 2. Risciacquare le lenti con Contacta Solution. 3. Lasciare immerse le lenti per almeno 4 ore o tutta la notte in Contacta Solution. 4. Risciacquare le lenti con Contacta Solution prima di indossarle. Componenti

EDTA 0,01%, Poliesametenbiguanide 0,0002%, Idrossietilcellulosa, Poloxamer 407 0,18%, Polyquaternium 0,004%. Avvertenze Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a uno dei componenti. In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non usare dopo la scadenza. Non utilizzare mai acqua del rubinetto per il risciacquo delle lenti. Consultare lo specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti. Non esistono controindicazioni accertate. Conservazione Conservare tra i 5°C e i 30°C. Una volta aperto, utilizzare entro 90 giorni. Formato Confezione da 2 flaconi da 360 ml.