

SOLUZIONE UNICA ISOTONICA PER LENTI A CONTATTO CONTACTA DA 360ML

Marchio: CONTACTA
Codice Min.: 906672074
Link: [clicca qui per acquistare](#)



CONTACTA SOLUZIONE UNICA PER LENTI A CONTATTO DescrizioneLa soluzione unica per lenti a contatto Contacta Solution è isotonica, sterile, contenente Poliesametenilbiguanide come principio attivo conservante. È un ottimo alleato nella manutenzione delle lenti a contatto, grazie alla sua capacità di detergere, disinfettare, idratare, risciacquare e conservare le lenti a contatto morbide. Adatta a tutti i tipi di lenti a contatto morbide. Anche per occhi sensibili.Modalità d'uso1. Lavare accuratamente le mani. Togliere le lenti dagli occhi, versare alcune gocce di Contacta Solution sulla lente e massaggiare sul palmo della mano per alcuni secondi. 2. Risciacquare le lenti con Contacta Solution. 3. Lasciare immerse le lenti per almeno 4 ore o tutta la notte in Contacta Solution. 4. Risciacquare le lenti con Contacta Solution prima di indossarle.ComponentiEDTA 0,01%, PoliEsaMetilenBiguanide 0,0002%,

Idrossietilcellulosa, Poloxamer 407 0,18%, Polyquaternium 0,004%.AvvertenzeNon utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a uno dei componenti. In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non usare dopo la scadenza. Non utilizzare mai acqua del rubinetto per il risciacquo delle lenti. Consultare lo specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti. Non esistono controindicazioni accertate.ConservazioneConservare tra i 5°C e i 30°C. Una volta aperto, utilizzare entro 90 giorni. FormatoFlacone da 360 ml Cod. SOL100