

## SOLUZIONE UNICA STERILENS ONE PLUS CON ACIDO IALURONICO 380ML

**Marchio:** STERILENS  
**Codice Min.:** 921666602  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**STERILENS STERILENS ONE plus** Descrizione Dispositivo medico. Soluzione polivalente per la disinfezione, conservazione, pulizia, idratazione, lubrificazione, risciacquo e rimozione dei depositi proteici di tutti i tipi di lenti a contatto, comprese quelle al silicone hydrogel. Indicata per portatori sensibili con predisposizione alla secchezza oculare. Modalità d'uso Lavarsi ed asciugarsi accuratamente le mani. Togliere la lente e metterla sul palmo della mano, strofinarla delicatamente su entrambi i lati con la soluzione. Risciacquare per eliminare ogni deposito. Porre le lenti a contatto nell'apposito astuccio, riempire con la soluzione. Per disinfettare le lenti lasciarle nella soluzione per almeno 4 ore o meglio tutta la notte. Prima di togliere le lenti dall'astuccio, agitare leggermente. Le lenti sono ora pronte per l'uso. Gettare la

soluzione e richiudere il contenitore. Componenti Soluzione isotonica e tamponata a pH 7,2 contenente: poliesametenilbiguanide (0,0001%), Mirapol A15, sodio edetato, methyloxirane polymer e sodio ialuronato (0,025%). Avvertenze Il prodotto è sterile fino alla prima apertura del flacone. Richiudere bene il flacone dopo l'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti. Conservazione Non congelare, tenere lontano da fonti di calore. Validità post-apertura: 90 giorni. Formato Flacone da 380 ml e portalenti in omaggio Cod. 70