

SPRAY NASALE PHYSIOMER CSR CON GETTO NORMALE CONFEZIONE DA 135ML

Marchio: PHYSIOMER
Codice Min.: 8004283125889
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Physiomer Getto Normale Dispositivo medico per la pulizia nasale diffuso in getto, adatto per il naso di adulti e bambini dai 2 anni d'età. Pulisce il naso e deterge i condotti nasali eliminando allergeni e agenti patogeni, batteri, virus inalati attraverso l'aria così come polvere, polline, fumo e agenti inquinanti; previene influenza e complicazioni infettive di orecchie, seni paranasali, e gola; aiuta a ristabilire una corretta respirazione in caso di naso chiuso o che cola. Naso chiuso o che cola: utilizzare da 4 a 6 volte al giorno per liberare i condotti nasali e ripristinare la respirazione in caso di raffreddore, rinofaringite, influenza e altre forme di rinite. Pulizia nasale: utilizzare tutti i giorni, una o due volte al giorno, per allontanare il muco e gli agenti infettivi e prevenire complicazioni alle vie respiratorie e uditive

(per esempio otiti) ed altre infezioni agli organi respiratori, come la faringe. Posizionare la testa sopra il lavabo o nella doccia ed inclinarla da un lato. Introdurre delicatamente il beccuccio nella narice superiore e premere con decisione l'erogatore per 2 o 3 secondi. Lasciare agire la soluzione per qualche secondo. Ripetere con l'altra narice girando la testa dall'altro lato e soffiare il naso delicatamente. Risciacquare il beccuccio con acqua calda dopo ogni utilizzo e asciugare bene. Riposizionare il beccuccio sul flacone premendo delicatamente. Flacone senza gas propellenti. Componenti Soluzione delicata e sterile di acqua di mare purificata. Senza additivi chimici né conservanti. Soluzione isotonica: contiene una combinazione di oltre 80 minerali con una concentrazione pari a 9g/l di cloruro di sodio (la stessa del corpo umano). Formato Flacone da 135 ml Cod. 12588