

SPRAY NASALE RINOREX FLU 50ML

Marchio: Stewart Italia
Codice Min.: 939464362
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Rinorex Flu Spray nasale che favorisce l'idratazione della mucosa nasale; è indicata in tutte le affezioni rinofaringee caratterizzate da congestione e alterazione della clearance muco-ciliare. Aiuta a mantenere libero il naso, riduce la secchezza idratandone delicatamente la superficie. Aiuta a regolarizzare le secrezioni nasali in seguito a rinite ed a prevenire la formazione e l'edificazione del biofilm batterico. Dispositivo medico CE, classe I. Modalità d'utilizzo 2-3 spruzzi per narice, 3-4 volte al giorno o più spesso al bisogno. Togliere il cappuccio di protezione dell'erogatore. Tenere il flacone ed il capo in senso verticale, posizionare delicatamente il beccuccio erogatore all'imbocco della narice. Premere con due dita sulla base dell'erogatore. Irrorare ed inspirare

contemporaneamente. Ripetere l'operazione con l'altra narice. Pulire l'erogatore. Rimettere il cappuccio di protezione dell'erogatore. Componenti Aqua; sodium chloride; acetyl cysteine; citric acid; sodium ascorbyl phosphate; sodium bicarbonate; disodium EDTA; potassium sorbate; sodium dehydroacetate; aroma mentha. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso d'irritazione locale. Evitare di spruzzare negli occhi. L'uso dello stesso flacone da parte di più soggetti può facilitare la trasmissione di infezioni. Non utilizzare in caso di epistassi in corso o appena conclusa. Conservazione Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e da fonti di calore. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Formato Soluzione in flacone di vetro da 50 ml, con erogatore spray verticale.