

SYSTANE ULTRA SENZA CONSERVANTI 10 ML

Marchio: SYSTANE
Codice Min.: 981491499
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Systane ULTRA Collirio Lubrificante Descrizione Dispositivo medico, soluzione sterile per un sollievo temporaneo dalle sensazioni di bruciore e irritazione causate da secchezza oculare. Può essere utilizzato anche per idratare tutte le lenti a contatto in silicone idrogel e morbide (idrofile), in caso di leggera irritazione, sensazione di fastidio o offuscamento. Senza conservanti. Componenti Soluzione sterile contenente polietilenglicole 400, glicole propilenico, idrossipropil guar, sorbitolo, amminometilpropanolo, acido bórico, potassio cloruro e sodio cloruro. Modalità d'uso Afferrare il flacone direttamente sotto il tappo e ruotare il tappo per aprire. Al primo utilizzo, tenere il flacone con un'angolazione di circa 90 gradi ed eliminare la prima goccia di prodotto. Agitare il flacone verso il basso per eliminare i residui di prodotto.

SYSTANE ULTRA Collirio lubrificante può essere usato secondo necessità durante l'intera giornata. Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio/occhi e aprire e chiudere le palpebre. Mentre si indossano lenti a contatto, se si verifica una leggera irritazione, sensazione di fastidio o offuscamento, instillare 1 o 2 gocce nell'occhio/occhi e aprire e chiudere le palpebre 2 o 3 volte. Può essere utilizzato anche prima e dopo l'applicazione delle lenti a contatto. Dopo l'uso, prima di mettere il tappo sul flacone, agitare il flacone verso il basso per eliminare i residui di prodotto eventualmente rimasti sulla punta. Chiudere il flacone. Avvertenze Esclusivamente per uso oculare. Le persone allergiche a qualsiasi componente di SYSTANE ULTRA Collirio Lubrificante non devono utilizzare questo prodotto. È di essenziale importanza attenersi alle istruzioni del proprio specialista e a tutte le istruzioni fornite sulle etichette per l'uso corretto del prodotto. Se si ha una sensazione di fastidio persistente, lacrimazione eccessiva, modificazioni alla vista o rossore agli occhi, sospendere l'uso di SYSTANE ULTRA Collirio lubrificante e consultare il proprio specialista, in quanto il problema potrebbe divenire più grave. L'offuscamento temporaneo della vista o disturbi visivi di altro tipo possono pregiudicare la capacità di guidare o utilizzare macchinari. In caso di visione offuscata dopo l'applicazione, il paziente dovrà attendere che la vista torni chiara prima di guidare o utilizzare qualsiasi macchinario. Non utilizzare in caso di anello di sicurezza danneggiato o mancante. Non usare se la confezione o il flacone (imballo sterile) è danneggiato. Per evitare contaminazioni, non mettere mai la punta del flacone contagocce a contatto con nessuna superficie. Se ingerito, consultare il medico. Se la soluzione cambia colore o diventa torbida, non utilizzare il prodotto. Rimettere il tappo dopo l'uso. Tenere il flacone ben chiuso quando non è utilizzato. Usare entro la data di scadenza indicata sul prodotto. Questo prodotto contiene acido bórico in quantità sicura se utilizzato secondo le istruzioni dell'etichetta. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare a temperature non superiori a 30°C. Validità post-apertura: 3 mesi. Formato Flacone contagocce da 10 ml. Cod. 0015070008