

TEST DI GRAVIDANZA CLEARBLUE FLIP & CLICK 1 PEZZO

Marchio: Procter & Gamble
Codice Min.: 8001841150802
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Clearblue Test di gravidanza Flip & Click Descrizione Test di gravidanza pieghevole con la sensibilità che ti aspetti da Clearblue. Il suo design innovativo consente di aprire ("flip") l'impugnatura e di bloccarla ("click") per ottenere un test di dimensioni normali. Dopo l'uso, puoi richiudere l'impugnatura per facilitare lo smaltimento. Punta molto larga: la punta che cambia colore diventa rosa per una pratica conferma. Risultati facili da leggere: un chiaro risultato espresso attraverso i simboli più (+) o meno (-) in 3 minuti. Modalità d'uso Leggere sempre attentamente il foglietto illustrativo prima di eseguire il test. Quando si è pronti per eseguire il test, rimuovere l'involucro di alluminio e utilizzare subito il prodotto. Aprire completamente l'impugnatura finché non senti uno scatto, poi rimuovere il cappuccio. Mantenere la punta larga che cambia colore sotto il

flusso di urina, oppure immergerla in un campione di urina raccolto in un contenitore asciutto e pulito, per soli 5 secondi. La punta che cambia colore diventa immediatamente rosa per mostrare che l'urina viene assorbita. Continuare a tenere la punta che cambia colore nell'urina per tutti i 5 secondi. Attendere 3 minuti. Non appena il test inizia a funzionare cominciano a comparire le linee blu. Leggere il chiaro risultato + o - nella finestra del risultato. Quando si legge il risultato, nella finestra di controllo deve essere presente una linea blu. Questa linea mostra che il test ha funzionato. Se entro 10 minuti non appare alcuna linea blu nella finestra di controllo, il test non ha funzionato. Non importa se una delle linee che formano il simbolo "+" è più chiara o più scura dell'altra; il risultato è "Incinta". Leggere il risultato entro 10 minuti dall'esecuzione del test. Ignorare eventuali cambiamenti del risultato che si verificano dopo questo intervallo di tempo. Avvertenze Solo per uso diagnostico in vitro. Non per uso interno. Non riutilizzare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test. Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato. Non usare il dispositivo dopo la data di scadenza. Conservazione Conservare a una temperatura compresa fra 2°C e 30°C. Formato Confezione da 1 pezzo. Cod. 81692723