

## UNGUENTO OFTALMICO KERATO VITA 5 G

**Marchio:** BRUSCHETTINI  
**Codice Min.:** 934643154  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**KERATO Vita Unguento oftalmico** Descrizione  
Unguento oftalmico senza conservanti che contiene, oltre al dexpanthenolo, anche vitamina A e vitamina E. Viene utilizzato per il miglioramento a lungo termine del film lacrimale e per la protezione intensiva della superficie oculare. Le sue proprietà di protezione cellulare permettono la normale riepitelizzazione quando questa è compromessa dalla secchezza.

Grazie alle sue proprietà di elevata viscosità, l'unguento oftalmico Kerato Vita ricopre la superficie dell'occhio come una pellicola, stabilizza il film lacrimale e protegge l'occhio dalla secchezza. Grazie alla sua consistenza molto morbida ed elastica, Kerato Vita si distribuisce molto bene sulla superficie oculare. Le palpebre scorrono facilmente sulla cornea e sulla congiuntiva. Kerato Vita fornisce un sollievo duraturo dai sintomi di secchezza, infiammazione e leggera irritazione, in particolare: - per la secchezza oculare; - nello stress ambientale; - in caso di affaticamento e stress visivo causato da visione prolungata; - in caso di stress meccanico. Modalità d'uso Lavarsi accuratamente le mani ogni volta prima di utilizzare Kerato Vita. Prima del primo utilizzo, rompere il sigillo di sicurezza aprendo il tappo a vite del cappuccio protettivo in senso antiorario e rimuovere la pellicola del sigillo di sicurezza prima dell'utilizzo. Tenere il tubetto il più verticale possibile, con l'apertura rivolta verso il basso, al di sopra dell'occhio. Evitare qualsiasi contatto della punta del tubetto con le dita e l'occhio. Reclinare ora la testa lievemente all'indietro e abbassare leggermente la palpebra inferiore con la mano libera. Premere leggermente sul tubetto e applicare circa 0,5 cm di unguento nel sacco congiuntivale dell'occhio interessato. Chiudere lentamente gli occhi e muovere i globi oculari in ogni direzione, in modo che Kerato Vita possa distribuirsi uniformemente sulla superficie degli occhi. Dopo l'uso, richiudere il tubetto con il cappuccio protettivo. Fare attenzione a non toccare la punta del tubetto. Evitare di piegare o arrotolare il tubetto per non danneggiarlo. Kerato Vita viene generalmente utilizzato 3 volte al giorno per il miglioramento a lungo termine del film lacrimale e per la protezione intensiva della superficie oculare. Si consiglia di applicare l'unguento possibilmente la sera prima di andare a letto, in modo che possa avere un effetto intensivo e duraturo sugli occhi irritati. L'applicazione deve essere continuata per un periodo di almeno 30 giorni. L'oculista deve stabilire la frequenza e la durata dell'applicazione. Se i sintomi persistono dopo questo periodo, rivolgersi nuovamente al proprio oculista. In caso di un altro trattamento locale degli occhi, rivolgersi al proprio oculista. In generale, devono passare circa 30 minuti tra le due applicazioni. Kerato Vita deve essere applicato dopo gli altri prodotti. Componenti Dexpanthenolo (2%), alfa-tocoferolo acetato (vitamina E), vitamina A palmitato, vaselina, paraffina, lanolina, alcool cetilstearyllico, acqua depurata. Avvertenze Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla

portata e dalla vista dei bambini. Non usare Kerato VitA in caso di ipersensibilità (allergia) a uno dei componenti. Kerato VitA non deve essere usato con le lenti a contatto. Le donne in gravidanza e in allattamento, i bambini e gli adolescenti devono consultare il proprio medico curante prima di utilizzare Kerato VitA. Non utilizzare se il tubetto o il sigillo di sicurezza sono danneggiati. Non toccare l'occhio con la punta del tubetto, per evitare infezioni o lesioni oculari. Non toccare la punta del tubetto con altri oggetti o parti del corpo. Non usare l'unguento oftalmico dopo la data di scadenza, indicata sul tubetto e sulla scatola pieghevole. Per motivi igienici, un singolo tubetto di Kerato VitA non deve essere utilizzato da più pazienti. Se i disturbi oculari persistono durante l'uso di Kerato VitA o si ripresentano dopo l'interruzione, consultare immediatamente il proprio oculista. Kerato VitA non è adatto come unico trattamento per un'infezione oculare. Consultare il proprio oculista se si sospetta un'infezione oculare. Occasionalmente sono stati osservati i seguenti effetti collaterali durante l'utilizzo di Kerato VitA: dopo l'applicazione, può comparire una temporanea compromissione dell'acuità visiva (visione offuscata). In questo caso, non guidare veicoli e non azionare macchinari. Si consiglia di attendere il ripristino della normale acuità visiva. Conservazione Conservare a temperature comprese fra +5 °C e +25 °C. Proteggere dal gelo e dalla luce solare diretta. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Validità post-apertura: 3 mesi. Formato Tubo da 5 g Cod. 000062