

## URGO FILMOGEL AFTE TRATTAMENTO PROTETTIVO 6 ML

**Marchio:** URGO  
**Codice Min.:** 921712509  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



URGO Afte Filmogel Descrizione Dispositivo Medico CE, classe I. Cerotto liquido pronto all'uso per il trattamento di afte (alla comparsa di 1-2 afte Una volta applicato, si forma un film protettivo, visibile, sottile ed elastico che: - isola da cibo e saliva fino a 4 ore; - allevia il dolore rapidamente e a lungo; - favorisce la cicatrizzazione. Dermatologicamente testato. Modalità d'uso Asciugare un lato dell'applicatore sul bordo del flacone. Applicare sulla lesione la quantità restante e spalmare con l'aiuto dell'applicatore fino a ricoprire la zona da trattare. Lasciare asciugare una decina di secondi e chiudere la bocca: si formerà un film visibile. Se la lesione non è ricoperta correttamente, ripetere l'operazione. Applicare all'occorrenza, fino ad un massimo di 4 volte al giorno e preferibilmente

prima dei pasti principali, fino a cicatrizzazione completa (3-5 giorni). Fino a quando il film resta visibile, non è necessario rinnovare l'applicazione. L'igiene del prodotto è garantita dalla sua composizione, non è necessario pulire l'applicatore dopo l'uso. Componenti Derivato cellulosico, acido minerale, acidi carbossilici, acqua, aroma, sucralosio. Controindicazioni Non applicare in caso di afte più grandi (di diametro >1 cm) o erpetiformi (afte di minuscola dimensione presenti in grande numero) le quali necessitano di un controllo medico. Non applicare sulle ferite infette, sulle bruciature e le ferite profonde (che sanguinano). Non utilizzare in caso di allergia ai derivati salicilici. In assenza di studi si consiglia di non usare in gravidanza e in allattamento. Precauzioni Richiudere sempre il flacone dopo l'utilizzo. Dopo l'apertura, si consiglia di consumare il prodotto entro 6 mesi. Applicare unicamente sulla mucosa orale. Al momento dell'applicazione può provocare una transitoria sensazione di fastidio e bruciore. Non utilizzare nei bambini al di sotto dei 6 anni d'età. Non raschiare, una volta formato il film scomparirà da solo. In assenza di miglioramenti dopo 5 giorni di trattamento, consultare il medico. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non ingerire il contenuto del flacone. Non fumare durante l'applicazione, prima della completa asciugatura del prodotto o vicino al flacone aperto. In caso di dubbi, chiedere consiglio al farmacista. In caso di ferite della bocca causate da un apparecchio o protesi dentale, è possibile usare il prodotto purché il film non venga ricoperto dal dispositivo stesso. Conservazione Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere lontano da fiamma o scintille. Conservare ad una temperatura inferiore ai 30°C. Validità dopo la prima apertura: 6 mesi. Formato Flacone da 6 ml con spatolina per l'applicazione.