

## WALKER EQUALIZER BASSO TUTORE FISSO PER TIBIO TARSICA GIBAUDORTHO 1

**Marchio:** GIBAUD  
**Codice Min.:** 978834885  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Dr. Gibaud Ortho WALKER EQUALIZER BASSO - TUTORE FISSO PER TIBIO-TARSICA DescrizioneDispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i. Indicazioni: - immobilizzazione a seguito di traumi o interventi chirurgici all'articolazione tibio tarsica; - distorsione grave e di media gravità della caviglia; - frattura metatarsale; - traumi dei tessuti molli e patologie infiammatorie o infettive che richiedono l'immobilizzazione; - fase di rieducazione e riabilitazione. Caratteristiche: - immobilizzazione dell'articolazione tibio tarsica ad angolo retto; - monoscocca a montanti laterali rigidi per favorire la stabilità dell'articolazione; - plantare in schiuma ad alta densità che garantisce l'ammortizzazione del tallone; - una cinghia di chiusura a strappo sulla

gamba e due sul piede per garantire l'immobilizzazione tibio tarsica; - stivale imbottito con possibilità di inserire dei rinforzi locali per la protezione della gamba e del piede; - suola arrotondata antiscivolo per facilitare la deambulazione; - veloce e facile da indossare, permette la rapida dismissal in occasione dei trattamenti terapeutici. Componenti Base e montanti: 100% poliammide Suola: 100% poliuretano Cinghie: 100% poliammide Modalità d'uso Istruzioni per il lavaggio Imbottitura: lavare a mano in acqua a 30° C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente. Non stirare. Parte rigida: pulire con una spugna umida. Asciugare con un panno. Avvertenze Per una corretta scelta della taglia, si consiglia di provare il prodotto. L'utilizzo di questo prodotto per indicazioni diverse da quelle riportate, necessita l'autorizzazione di un medico. Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico. Utilizzare una protezione cutanea in caso di lesioni dermatologiche, forme allergiche o ipersensibilità ai componenti tessili del prodotto. Conservazione Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce. Formato Altezza cm Misura calzatura Taglia 25 da 37 a 40 1Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di  $\pm 1$  cm Cod. 5G0631X00BA01