

XILOIAL FORTE MONODOSE 20 MINICONTENITORI DA 0,5ML

Marchio: XILOIAL
Codice Min.: 930773748
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Xiloial FORTE Dispositivo medico CE. Soluzione oftalmica a base di Ts-Polisaccaride contenente Acido Ialuronico ad alto peso molecolare, ottenuto per sintesi biotecnologica. L'Acido ialuronico è una sostanza che dà origine a soluzioni mucomimetiche, con elevate proprietà lubrificanti; la viscosità di tali soluzioni è tale da consentire un elevato effetto idratante ed una stabilizzazione del film lacrimale. Il Ts-Polisaccaride è una sostanza vegetale, estratta dai semi della pianta del tamarindo (Tamarindus Indica), utile per la protezione della superficie corneo-congiuntivale. Il Ts-Polisaccaride forma sulla superficie oculare un film protettivo in grado di favorire il ripristino del normale equilibrio fisiologico del film lacrimale e della superficie oculare. La combinazione delle due

sostanze, permette dunque un'attività sinergica di protezione della superficie corneo/congiuntivale, dalle irritazioni dovute a cause fisiche ambientali (vento, esposizione prolungata ai raggi solari, fumo di sigaretta, aria secca), a stress visivo (intenso impegno della vista, videoterminali) o a fattori meccanici (lenti a contatto, interventi di chirurgia oculare). La concentrazione della miscela è calibrata in maniera tale da permettere la lubrificazione anche nei casi di discomfort più intenso. Modalità d'utilizzo Dopo aver aperto la busta di protezione, separare un flaconcino dagli altri. Aprire il flaconcino ruotando e tirando il cappuccio. Somministrare una goccia di Xiloial mono nell'occhio, esercitando una leggera pressione sul corpo del flaconcino. È possibile ripetere l'operazione più volte al giorno, secondo necessità. Avvertenze Il prodotto è solo per uso esterno oftalmico. Dopo la somministrazione, può verificarsi un temporaneo offuscamento visivo che comunque scompare entro pochi minuti: è conveniente attendere la scomparsa dell'offuscamento prima di intraprendere qualunque attività che richieda chiarezza visiva (guida di autovetture, impiego di macchinari, ecc.). Non utilizzare Xiloial Forte se il flaconcino risultasse danneggiato. Evitare di toccare l'occhio con la punta del flaconcino. Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione. Lasciar trascorrere 10-15 minuti tra l'instillazione di Xiloial Forte e l'eventuale instillazione di farmaci per uso oftalmico esterno. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La formulazione non contiene conservanti. Xiloial Forte è confezionato in comodi flaconcini richiudibili che consentono un uso ripetuto durante il giorno. Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Conservazione Conservare al di sotto di 25°C. Utilizzare ciascun flaconcino entro 12 ore dall'apertura. Non disperdere il flaconcino nell'ambiente dopo l'uso. Componenti Acido ialuronico; Ts-polisaccaride; mannitolo; sodio fosfato monobasico monoidrato; sodio fosfato bibasico dodecaidrato; acqua per preparazioni iniettabili. Formato 20 flaconcini richiudibili da 0,5 ml senza conservanti.